

Luotettavaa inhalaatiohoitoa

OptiChamber Diamond auttaa saamaan inhalaatiolääkkeesi kokonaan keuhkoihin, joissa se tehoaa.

Noudata näitä ohjeita ja lue myös OptiChamber Diamondin pakkauksessa olevat käyttöohjeet.



Irrota korkki sekä inhalaatiolääkkeestä ja että OptiChamber Diamondista. Poista mahdolliset vierasesineet kammion ennen käyttöä.



Aseta inhalaatiolääkkeen suukappale OptiChamber Diamondin joustavaan osaan.



Jos tarvitset maskia, aseta maski OptiChamber Diamondiin kammion vastakkaiseen päähän ja kierrä kevyesti, kunnes maski on tiiviisti ja tukevasti paikallaan.



Ravista OptiChamber Diamondia.



Sulje huulet tiiviisti suukappaleen ympärille. Hengitä ulos. Paina kerran inhalaatiolääkettä ja hengitä sisään 2–5 kertaa.*



Jos OptiChamber Diamond "viheltää" hengittäessäsi sisään, vedä henkeä rauhallisemmin. Pidätä hengitystä 8 sekunnin ajan ja hengitä sitten ulos.



Jos käytät maskia, sen on oltava tiiviisti nenän ja suun ympärillä. Paina kerran inhalaatiolääkettä ja hengitä sisään 2–5 kertaa.*



Kun vedät henkeä, uloshengitysenttiili pyrkii avautumaan, mikä helpottaa inhalaatiohoidon seurainta.

*Jos lääkäri on määrännyt sinulle useamman kuin yhden hengityksen, odota noin 1 minuutin ajan ja toista sitten vaiheet 4–8.