


SOEHNLE

PROFESSIONAL

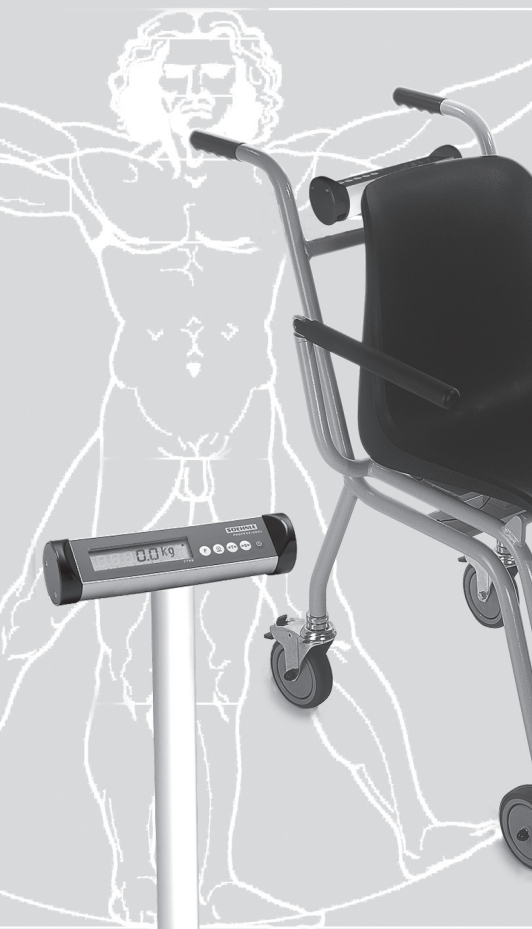

Οδηγίες Χρήσης

7700, 7701, 7702



Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της Soehnle Professional. Όλα τα χαρακτηριστικά αυτού του προϊόντος έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με την τελευταία λέξη της σύγχρονης τεχνολογίας και έχουν τελειοποιηθεί έτσι ώστε ο χειρισμός του να είναι ο απλούστερος δυνατός.

Εάν έχετε απορίες ή προβλήματα τα οποία δεν καλύπτονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό της περιοχής σας ή επισκεφτείτε τη δικτυακή τοποθεσία της εταιρείας μας: www.soehnle-professional.com.

Τύπος	Εκτέλεση	Εφαρμογές	Εύρος Ζύγισης	e =	Ελάχιστο	Μέρη Καταλόγου
7700	Στήλη	Πλατφόρμα	1 = 150 kg	50 g	1 kg	470.014.019
			2 = 250 kg	100 g	2 kg	
7701	Βαλίτσα	Πλατφόρμα	1 = 150 kg	50 g	1 kg	470.014.020
			2 = 250 kg	100 g	2 kg	
7702	Καρέκλα	Κάθισμα	1 = 150 kg	50 g	1 kg	470.014.021
			2 = 200 kg	100 g	2 kg	



Σήμανση CE

Το προϊόν παρέχεται με σήμα CE σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες

- 89/336/EWG Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.
- 73/23/EWG "Οδηγία χαμηλής τάσης"
- 90/384/EWG Μη αυτόματοι ζυγοί
- 93/42/EWG Ιατρικά προϊόντα (διάθεση στην κατηγορία I με λειτουργία μέτρησης)



Ταξινόμηση

- Κατηγορία I ιατρικών προϊόντων της κατηγορίας I με λειτουργία μέτρησης
-  Ηλεκτρική προστασία κλάση II (γεντελώς μονωμένα, χωρίς σύνδεση προστατευτικού αγωγού)
-  Εφαρμογή (βλέπε παραπάνω) τύπου B
- Υδατική προστασία σύμφωνα με το IEC529: IP20

Οδηγίες ασφαλείας

Η συσκευή δεν διαθέτει διακόπτη ισχύος. Όταν το βύσμα τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο με την τροφοδοσία ρεύματος και τους ζυγούς, η συσκευή τροφοδοτείται με ρεύμα. Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, το "OFF" μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη.

Οι συσκευές που έχουν υγρανθεί εξαιτίας μιας αλλαγής στη θερμοκρασία μπορούν να ενεργοποιηθούν μόνον εφόσον είναι απολύτως στεγνά. Τροφοδοτικά ισχύος που έχουν υγρανθεί δεν πρέπει να ενεργοποιηθούν καθόλου. Αντικαταστήστε τους με ένα αυθεντικό τροφοδοτικό ρεύματος. Χρησιμοποιείτε μόνο τροφοδοτικά ισχύος που συμμορφώνονται με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 60601-1.

Προβλεπόμενη χρήση

Αυτοί οι ζυγοί Soehnle Professional προορίζονται για ζύγιση των ασθενών. Με ζυγούς στήλης και βαλίτσας, η ζύγιση μπορεί να γίνει μόνο εάν ο ασθενής είναι όρθιος. Με ζυγούς τύπου καρέκλας, η ζύγιση μπορεί να γίνει μόνο εάν ο ασθενής κάθεται.

Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας αποτελούν μέρος της συσκευής. Θα πρέπει πάντοτε να διατηρούνται κοντά στη συσκευή. Η συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες είναι υποχρεωτική ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία της συσκευής. Αν η συσκευή αποτύχει να λειτουργεί σωστά, η συσκευή μπορεί να έχει υποστεί βλάβη.

Η συσκευή θα πρέπει στη συνέχεια να αποσταλεί σε εγκεκριμένο κέντρο παροχής τεχνικής υποστήριξης. Μόνο γνήσια ανταλλακτικά χρησιμοποιούνται σε εξουσιοδοτημένο κατάστημα που διεξάγει επισκευές. Τα γνήσια ανταλλακτικά περιγράφονται στα αρχεία τεχνικής υποστήριξης, μαζί με τον αριθμό παραγγελίας (βλ. πίνακα για τον κατάλογο των αριθμών ανταλλακτικών). Η Soehnle Professional θα αναλάβει την ευθύνη για την ασφάλεια της συσκευής αν αυτές οι οδηγίες μελετηθούν και η συσκευή λειτουργήσει σε συμμόρφωση με τις οδηγίες λειτουργίας. Η συσκευή είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν και πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο από άτομα που είναι σε θέση να χειρίζονται σωστά τη συσκευή ως αποτέλεσμα της εκπαίδευσής τους ή των γνώσεών τους. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ο χρήστης πρέπει να διασφαλίζει ότι η συσκευή είναι λειτουργική και σε καλή κατάσταση λειτουργίας.

Ο χειριστής πρέπει να γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε ιατρικά δωμάτια λόγω κινδύνου έκρηξης.


Περιοχές υψηλού κινδύνου εκρήξεων μπορεί να προκύψουν, εάν χρησιμοποιούνται εύφλεκτοι αναισθητικοί παράγοντες, καθαριστικά και απολυμαντικά δέρματος .

Χρήση πρόσθετων συσκευών



Μόνο οι πρόσθετες συσκευές (εκτυπωτής, υπολογιστής) μπορούν να συνδέονται με τη σειριακή θύρα δεδομένων, εφόσον ανταποκρίνονται με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 60601-1 ή μια κατάλληλη αποσυνδεδεμένη συσκευή συνδεθεί σε σειρά.

Εφαρμογείς

 Μόνο οι εφαρμογείς που περιλαμβάνονται στον πίνακα, μπορούν να έρθουν σε επαφή με τον ασθενή.

Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη

Η δοκιμή επιθεώρησης μέτρησης διενεργήθηκε κατά την αρχική διαδικασία διακρίβωσης της παραγωγής. Η περαιτέρω τακτική επιθεώρηση των δοκιμών μέτρησης (επιαναβαθμονόμηση) πρέπει να εκτελείται από τις υπεύθυνες αρχές βαθμονόμησης, σύμφωνα με τις εθνικές ρυθμίσεις. Οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται μόνον από ένα κέντρο εξουσιοδοτημένο από την Soehnle Professional χρησιμοποιώντας γνήσια ανταλλακτικά.

Καθαρισμός

Πριν τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο αφαιρώντας το βύσμα από την πρίζα του τοίχου. Καθαρίστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας μόνο ένα υγρό πανί. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εισαχθεί νερό στη συσκευή. Απολυμαντικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την μεμβράνη πληκτρολογίου της οθόνης και για τον εφαρμογέα.

Τα ακόλουθα απολυμαντικά επιτρέπονται: Μεθυλιωμένο οινόπνευμα, Ισοπροπανόλη, 2% Kohrsolin, 1% υδατικό διάλυμα Sokrena , 5% Sagrotan, 5% Gigasept. Απαγορεύεται να ψεκάζετε τη συσκευή και το βύσμα ισχύος.

Πριν από την έναρξη της χρήσης της συσκευής, παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τις πληροφορίες που περιέχονται στις Οδηγίες Χρήσης. Περιέχουν σημαντικές οδηγίες για την εγκατάσταση, τη σωστή χρήση και συντήρηση της συσκευής.

Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τις ζημιές που προκύπτουν από κακή λειτουργία, δηλαδή, μη σωστή παρακολούθηση των Οδηγιών Χρήσης: Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εξαρτήματα υπό αυξημένες απαιτήσεις ασφαλείας, πάντα να συμμορφώνονται με τους κατάλληλους κανονισμούς. Ποτέ να μην εκτελείτε εργασίες στη συσκευή, ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Ακατάλληλη εγκατάσταση θα καταστήσει την εγγύηση άκυρη. Το ηλεκτρικό δίκτυο πρέπει να είναι συμβατό με τις προδιαγραφές που είναι τυπωμένες στη συσκευή παροχής ρεύματος. Η συσκευή προστατεύεται από τη σκόνη και τυχόν μικρή ποσότητα σταγονιδίων νερού, σύμφωνα με την κατηγορία προστασίας IP 65. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι σφραγίδες είναι άθικτες. Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία από τη μπαταρία, κλείστε την υποδοχή ρεύματος χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καπάκι από καουτσούκ.

Η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Να μην υπερβαίνετε τις ανώτατες τιμές που ορίζονται στις ισχύουσες προδιαγραφές.

Σημειώσεις

Η καταστολή των παρεμβολών της μονάδας αντιστοιχεί στην κοινοτική οδηγία που ισχύει 89/336/EWG.

Η απεικόνιση των τιμών μπορεί να επηρεάζεται από ακραίες ηλεκτροστατικές και ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, όπως π.χ. λειτουργία μιας μονάδας ραδιόφωνου ή ένα κινητό τηλέφωνο πολύ κοντά στη μονάδα. Όταν οι ηλεκτροστατικές παρεμβολές δεν είναι πλέον παρούσες, η μονάδα μπορεί και πάλι να χρησιμοποιηθεί όπως προορίζεται. Μπορεί να χρειαστεί να τον ενεργοποιήσετε ξανά.

Εάν υπάρχουν μόνιμες ηλεκτροστατικές παρεμβολές, συνιστούμε γείωση της πλατφόρμας.

Η μονάδα είναι ένα όργανο μέτρησης. Ατμοσφαιρικά ρεύματα, δονήσεις, ταχείες αλλαγές της θερμοκρασίας και το άμεσο ηλιακό φως ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην ακρίβεια του ζυγού.

Μια σύντομη ολιγόλεπτη προθέρμανση μετά την ενεργοποίηση σταθεροποιεί τις μετρούμενες τιμές. Θέστε το προϊόν προς ζύγιση προσεκτικά επάνω στο ζυγό. Μην διατηρείται μόνιμα φορτία στην πλατφόρμα. Αποφεύγετε τυχόν χτυπήματα ή υπερφόρτωση πάνω από το αναφερόμενο μέγιστο φορτίο. Αυτά θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στον ζυγό.

Συμπλήρωση: Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν οι ζυγοί που δεν είναι σε χρήση για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σωστή απόρριψη μπαταριών

Οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται ως οικιακά απορρίμματα. Ο νόμος ορίζει ότι εσείς, ως καταναλωτής, πρέπει να επιστρέψετε τις άδεις μπαταρίες είτε σε δημόσια σημεία συλλογής στην πόλη σας ή σε οποιοδήποτε κατάστημα πώλησης μπαταριών του ίδιου είδους.

Σημείωση: Οι μπαταρίες περιέχουν ρυπογόνες ουσίες που χαρακτηρίζονται ως εξής:



Pb = Η μπαταρία περιέχει μόλυβδο

Cd = Η μπαταρία περιέχει κάδμιο

Hg = Η μπαταρία περιέχει υδράργυρο

Εγγύηση - Ευθύνη

Αν παρουσιαστεί βλάβη ή ελάττωμα κατά την παραλαβή της μονάδας που είναι εντός του πεδίου ευθύνης της Soehnle Professional, η Soehnle Professional έχει το δικαίωμα είτε να επιδιορθώσει τη βλάβη ή να προμηθεύσει μονάδα αντικατάστασης. Τα αντικαταστημένα μέρη είναι ιδιοκτησία της Soehnle Professional. Σε περίπτωση που η επισκευή ή η αντικατάσταση του δεν είναι επιτυχής, ισχύουν οι νομικές διατάξεις. Η διάρκεια της εγγύησης είναι 2 χρόνια, από την ημέρα της αγοράς. Παρακαλείσθε να διατηρείτε την απόδειξη αγοράς. Εάν ο ζυγός σας χρειάζεται επισκευή, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο σας ή το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Soehnle Professional.

Καμία ευθύνη δεν γίνεται αποδεκτή για βλάβες που οφείλονται σε οποιονδήποτε από τους παρακάτω λόγους: Ακατάλληλη ή λανθασμένη αποθήκευση ή χρήση, εσφαλμένη εγκατάσταση ή τοποθέτηση από τον ιδιοκτήτη ή από τρίτο πρόσωπο, τφ φυσική φθορά, αλλαγές ή τροποποιήσεις, ανακριβή ή αμελή χειρισμό, υπερβολική χρήση, χημικές, ηλεκτροχημικές ή ηλεκτρικές παρεμβολές ή υγρασία, εκτός εάν αυτό δεν οφείλεται σε αμέλεια της Soehnle Professional.

Για ζυγούς που υποβάλλονται σε βαθμονόμηση, τα όρια σφάλματος αναφέρονται στον επίσημο σχεδιασμό και τους κανονισμούς βαθμονόμησης που ισχύουν την ημέρα που γίνεται η παραγγελία για την κατασκευή του ζυγού η οποία εφαρμόζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του αγοραστή ή για τον αναγνωρισμο σκοπό χρήσης. Για τις αποστολές που προορίζονται εν γνώσει της Soehnle Professional για αποστολή στο εξωτερικό, οι κανονισμοί για το σχεδιασμό και τη βαθμονόμηση της χώρας προορισμού πρέπει να είναι γνωστοποιούνται έγκυρα στη Soehnle Professional από το πρόσωπο που πραγματοποιεί την παραγγελία.

Εάν λειτουργικές, κλιματικές ή οποιεσδήποτε άλλες επιδράσεις οδηγήσουν σε μια σημαντική αλλαγή των συνθηκών ή την ποιότητα υλικών, η εγγύηση για την άριστη λειτουργία μονάδας θα πρέπει να καθίσταται άκυρη. Εάν η Soehnle Professional παρέχει μια ατομική εγγύηση, αυτό σημαίνει ότι η μονάδα θα είναι απαλλαγμένη από ελαττώματα για τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης.

Διατηρείτε πάντα την αρχική συσκευασία, στην περίπτωση που θα πρέπει να επιστρέψετε το ζυγό.

Απόρριψη

Εάν οι ζυγοί και τα μέρη των ζυγών δεν χρησιμοποιούνται πλέον, οι τοπικές αρχές απόρριψης αποβλήτων θα σας ενημερώσει για τα μέτρα που θα πρέπει να λάβετε για την απόρριψη των ζυγών με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο.

Περιγραφή τύπου ετικέτας

001

	I<->I1	I<->I2	
Max	15 kg	30 kg	
Min	200 g	400 g	
e=	10 g	20 g	
SNR	XXXXX-XXXXX		
(D)	D03-09-013	M	CE03
SOEHNLE			XXXX

- I<->I1** Εύρη ζύγισης
- Max** Ανώτατο επιτρεπόμενο εύρος ζύγισης
- Min** Ελάχιστο επιτρεπόμενο εύρος ζύγισης
- e=** Τιμή βαθμονόμησης (διαβάθμιση)
- SNR** Σειριακός αριθμός της ζυγαριάς (Τύπος ζυγαριάς, τελικό ψηφίο έτους κατασκευής, αύξων αριθμός)
- CE03** Σύμβολο συμμόρφωσης με τις οδηγίες της Ε.Ε. με το έτος τοποθέτησης, συγχρόνως έναρξης ισχύος της βαθμονόμησης
- (D)** Κατηγορία ακριβείας
- D03-09-019** Αρ. της άδειας της Ε.Ε.
- 0118** π.χ 0118, αρ. καταχώρισης του "κατονομαζόμενου φορέα" (αυτός ο φορέας πραγματοποίησε την αρχική βαθμονόμηση)
- M** Σύμβολο για την βαθμονόμηση σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε.
- 001** Κατάσταση του μετρητή βαθμονόμησης

Μετρητής βαθμονόμησης



001

Η τιμή του μετρητή βαθμονόμησης δείχνει πόσο συχνά βαθμονομείται μια ζυγαριά. Η αποθηκευμένη τιμή του μετρητή θα πρέπει να συμφωνεί με τη τιμή του επικολημένου μετρητή βαθμονόμησης επάνω στο βύσμα βαθμονόμησης.

Ανάκληση της τιμής του μετρητή βαθμονόμησης

E CAL

002



Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  και έπειτα πατήστε το πλήκτρο . Κρατήστε πατημένα και τα 2 πλήκτρα για 3 δευτερόλεπτα.

Πατήστε το πλήκτρο  2 φορές.


Διαγραφή της ένδειξης της κατάστασης του μετρητή βαθμονόμησης

Πατήστε το πλήκτρο  1 φορά

Πατήστε το πλήκτρο  1 φορά

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  και έπειτα, πατήστε το πλήκτρο .

Εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας

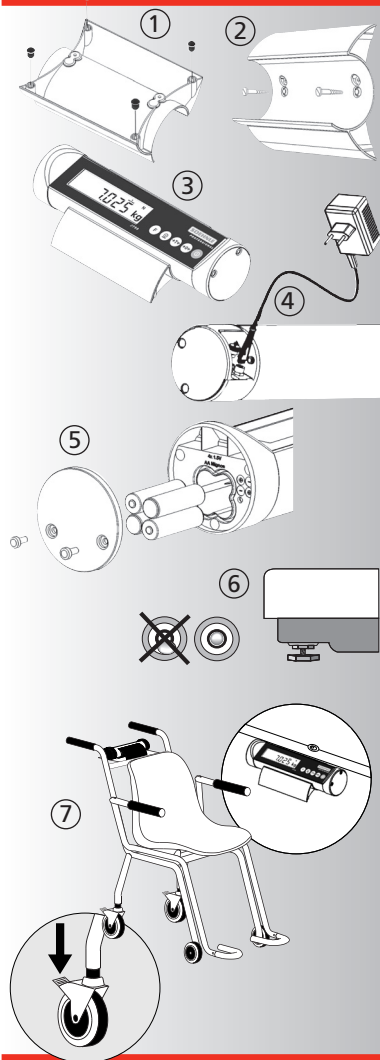

Η συσκευή ενδείξεων είναι ήδη εγκατεστημένη στη ζυγαριά και με τη χρήση του παρεχόμενου στηρίγματος μπορεί να τοποθετηθεί επάνω σε τραπέζι ή να στερεωθεί στον τοίχο.

1. Για επιτραπέζια τοποθέτηση, χρησιμοποιήστε ελαστικές βάσεις.
2. Για επιτοίχια τοποθέτηση, στερεώστε το στήριγμα στον τοίχο Περίπου 110–150 εκ. πάνω από το δάπεδο.
3. Τοποθετήστε τη συσκευή ενδείξεων επάνω στο στήριγμα.
4. Συνδέστε το τροφοδοτικό...
5. ... και/ή τοποθετήστε τις μπαταρίες/το συσσωρευτή (4 κ 1,5 V AA). Για την τοποθέτηση, χαλαρώστε τις 2 βίδες στη δεξιά πλευρά του περιβλήματος.



Εάν η συσκευή λειτουργεί με το τροφοδοτικό, χρησιμοποιείτε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Οι κανονικές μπαταρίες θα καταστρέψουν την συσκευή.

6. Τοποθετήστε τον ζυγό στο σημείο της εφαρμογής. Ευθυγραμμίστε τους 7700 και 7701 χρησιμοποιώντας ένα αλφάδι σιγουρευτείτε ότι η συσκευή έχει οριζόντια θέση.
7. Ευθυγραμμίστε τον 7702 χρησιμοποιώντας ένα αλφάδι και το ρυθμιζόμενα πόδια έως ότου γίνει οριζόντιο. Κατά την διαδικασία ζύγισης, ασφαλίστε την συσκευή χρησιμοποιώντας τα φρένα στα ρυθμιζόμενα πόδια. Ο ζυγός είναι έτοιμος προς χρήση.

Τα πλήκτρα χειρισμού

- Ενεργοποίηση - Απενεργοποίηση
- Μηδενισμός
- Ζύγιση απόβαρου
- Εκτύπωση
- Πλήκτρο λειτουργίας (βλέπε σελίδα 9)



Ενδεικτικά σύμβολα

hold Η ένδειξη έχει σταθεροποιηθεί για ευκολότερη ανάγνωση


Αντικατάσταση μπαταριών ή φόρτιση επαναφορτιζόμενων μπαταριών.

Μηδενική τιμή

N Καθαρό βάρος

pcs Τρόπος λειτουργίας καταμέτρησης τεμαχίων

Ωφέλιμο εύρος τιμών φορτίου

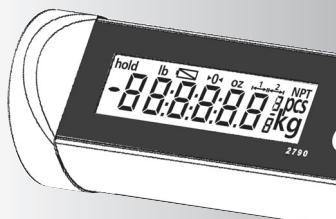

Ενεργοποίηση



Μόνον εφόσον δεν υπάρχει κανένα φορτίο στη ζυγαριά.



Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου μηδενίστε την ένδειξη. Η ζυγαριά είναι έτοιμη για λειτουργία.

Ανεβείτε ή καθίστε πάνω στο ζυγό.

Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται το βάρος του σώματος.

Ρυθμίζοντας στο μηδέν



Απαραίτητο όταν δεν εμφανίζεται το μηδέν στην οθόνη, όταν δεν υπάρχει κανένα φορτίο στη ζυγαριά. Πιθανό εύρος μηδενικών τιμών -1% ... +3% του εύρους τιμών φορτίου.

Ζύγιση του απόβαρου



Τοποθετείστε μια πετσέτα ή κάτι παρόμοιο στο ζυγό. Πατήστε το πλήκτρο →T←. Ο ζυγός είναι έτοιμος να μετρήσει το καθαρό βάρος.

Διαγραφή του απόβαρου



Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται το μικτό βάρος ή η ένδειξη 0.000 όταν στη ζυγαριά δεν υπάρχει καθόλου φορτίο.

Απενεργοποίηση




Αυτό είναι άμεσα δυνατό ενώ εμφανίζεται η ένδειξη "0" στην οθόνη. Σε διαφορετική περίπτωση, κρατήστε το πλήκτρο πατημένο για 3 δευτερόλεπτα. Όταν ο ζυγός λειτουργεί από το ηλεκτρικό δίκτυο, το μήνυμα "OFF" εμφανίζεται στην οθόνη.

Εκτυπωτής / Η/Υ



Αποστολή δεδομένων στον εκτυπωτή ή τον ΗΥ.

Σημείωση

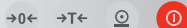

Οι λειτουργίες αυτές εκτελούνται μόνον σε κατάσταση ηρεμίας και μέχρι 5 δευτερόλεπτα μετά το πάτημα του πλήκτρου.

Επιπρόσθετες λειτουργίες



Το πλήκτρο λειτουργίας **F** μπορεί να προγραμματιστεί με μία από τις παρακάτω λειτουργίες: Λειτουργία αναμονής, εναλλαγή μονάδων, BMI (Δείκτης Μάζας Σώματος) και την ειδική λειτουργία κατά την αιμοκάθαρση. Από το εργοστάσιο έχει επιλεγεί ο BMI (Δείκτης Μάζας Σώματος). Αλλαγές μπορούν να γίνουν στον τρόπο λειτουργίας χρήστη (σελ. 9/10).

BMI (Δείκτης μάζας Σώματος)

H: 170

61:26.2

82.8 kg

- Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας **F**.
- Στην οθόνη εμφανίζεται, π.χ. 170 = ύψος σώματος σε cm
- Για ύψος σώματος >170 cm: Πατήστε το πλήκτρο **→0←** έως ότου το ύψος του σώματος να είναι το σωστό.
- Για ύψος σώματος <170 cm: Πατήστε το πλήκτρο **→T←** έως ότου το ύψος του σώματος να είναι το σωστό.
- Επιβεβαιώστε πατώντας το **⊖**.
- Η οθόνη μεταβιβάζεται στην λειτουργία ζύγισης 0.00 kg.
- Ζύγιση.
- Αφού οι ένδειξεις σταματήσουν να κινούνται, η οθόνη δείχνει τον BMI και το βάρος εναλλαξ.

Κατηγοριοποίηση BMI (Δείκτη Μάζας Σώματος)

(σύμφωνα με την DGE-Γερμανική εταιρεία για την διατροφή, Αναφορά διατροφής 1992)

Κατηγορία		
Λιποβαρής	< 20	< 19
Φυσιολογικό Βάρος	20 – 25	19 – 24
Υπέρβαρος	25 – 30	24 – 30
Παχυσαρκία	30 – 40	30 – 40
Σοβαρή Παχυσαρκία	> 40	> 40

Ειδική λειτουργία κατά την αιμοκάθαρση (ενδιάμεσο απόβαρο)

hold 82.8 kg

82.8 kg

Εάν είναι ρυθμισμένη αυτή η λειτουργία, ο χειριστής μπορεί να δώσει στον ασθενή μια κουβέρτα ή ένα βιβλίο ή να τα αφαιρέσει χωρίς να επηρεαστεί η ένδειξη του βάρους. Πατήστε το πλήκτρο **F**. Το 'Hold' εμφανίζεται στην οθόνη. Δώστε ή πάρτε πίσω το βιβλίο και πιέστε ξανά το **F**. Η προηγούμενη ένδειξη βάρους θα εμφανιστεί χωρίς την ένδειξη 'Hold', αλλά με την ένδειξη 'N'. Η ένδειξη είναι τώρα το καθαρό βάρος. Το απόβαρο αποθηκεύεται στην μνήμη των απόβαρων.

Λειτουργία συγκράτησης



0.000 kg

hold 82.8 kg

Όταν έχει επιλεγεί αυτός ο τρόπος λειτουργίας, πατήστε το πλήκτρο **F**. Εμφανίζεται η ένδειξη 'Hold', έως ότου η τιμή υπολογιστεί και 'παγώσει'. Η ρύθμιση αυτών των 6 τρόπων λειτουργίας μπορεί να γίνει στον τρόπο

Λειτουργία	Λειτουργία συγκράτησης	Απομάκρυνση πιέζοντας
Μη αυτόματος	Σε κατάσταση πρεμίας εκτός της περίπτωσης μηδενικών τιμών	Πλήκτρο ⊖
Αυτόματος	Κατά την αύξηση του βάρους και την επάνοδο σε κατάσταση πρεμίας	Απομάκρυνση φορτίου από το ζυγό
Κινητός δείκτης, μη αυτόματα	Κατά την αύξηση του βάρους και την επάνοδο σε κατάσταση πρεμίας	Πλήκτρο ⊖
Κινητός δείκτης, αυτόματα		Απομάκρυνση φορτίου από το ζυγό
Μέγιστη τιμή, μη αυτόματα	του μέγιστου βάρους που επιτεύχθηκε (χωρίς να είναι ακινητοποιημένη)	Πλήκτρο ⊖
Μέγιστη τιμή, αυτόματα		Απομάκρυνση φορτίου από το ζυγό

Αλλαγή kg/lb (χωρίς βαθμονομημένες μονάδες)




Ο αντιπρόσωπός σας μπορεί να ενεργοποιήσει 2 διαφορετικές λειτουργίες:

Ανάθεση στο πλήκτρο **F** για την εναλλαγή των μονάδων. (Κατά την επανεκκίνηση εμφανίζεται η πιο πρόσφατα επιλεγμένη μονάδα.)


Γενικός περιορισμός σε kg ή lb (το πλήκτρο **F** μπορεί να προγραμματιστεί με τις λειτουργίες Count ή Hold).

Λειτουργία Χρήστη

Η λειτουργία Χρήστη είναι ένας τρόπος λειτουργίας για τη ρύθμιση των λειτουργικών παραμέτρων του χρήστη.



Μετάβαση από τη λειτουργία Ζύγισης στη λειτουργία Χρήστη: πιάστε το πλήκτρο **⊖** και το πλήκτρο **Ⓜ** για 5 δευτερόλεπτα.

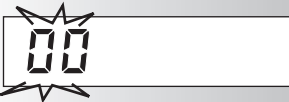

Καλέστε την θέση λειτουργίας Χρήστη, πιάστε το πλήκτρο **⊖**.



Αυξήστε και ελαττώστε την θέση λειτουργίας του Χρήστη
Αυξήστε πιέζοντας το πλήκτρο **→T+**. Ελαττώστε πιέζοντας το πλήκτρο **F**.



Μεταβείτε στην λειτουργία Επεξεργασίας πιέζοντας το πλήκτρο **⊖**.



Επιλέξτε τη δεκάδα πατώντας το πλήκτρο **→0+**. Αναβοσβήνει η ενεργή δεκάδα.



Ορίστε την τιμή της θέσης Λειτουργίας Χρήστη: προχωρήστε εμπρός πατώντας το πλήκτρο **→T+**. Πίσω πατώντας το πλήκτρο **F**.

Αποθηκεύστε την τιμή πατώντας το πλήκτρο **⊖**.




Μεταβείτε στο αρχικό επίπεδο πατώντας το πλήκτρο **→0+**.

Βγείτε από τη Λειτουργία Χρήστη και αποθηκεύστε τα δεδομένα πατώντας τα πλήκτρα **⊖** και **→0+** ταυτόχρονα.


Θέση Βαθμονόμησης	R/W	Περιεχόμενα	Εύρος Τιμών	Σχόλια	Αρχική
00	R	Αριθμός έκδοσης	000 ... 9.99	Τρέχουσα έκδοση	1.00
01	W	Πίσω φωτισμός Κατά τη λειτουργία με συσσωρευτή. ανάβει για 30 δευτερόλεπτα (Κατά τη λειτουργία με μετασχηματιστή είναι συνεχώς αναμμένος)	0 1	Σβηστός Ανάβει μετά από πάτημα του πλήκτρου ή μετά από αλλαγή βάρους	0
02	W	Αυτόματη καθυστέρηση απενεργοποίησης	0 1 ... 60	Χωρίς αυτόματη απενεργοποίηση Καθυστέρηση απενεργοποίησης σε λεπτά	3
03	W	Κενή τιμή	0.99,9	Κενή τιμή σε ποσοστό % του μέγιστου φορτίου	1.0
04	W	Πλήκτρο λειτουργίας	0 1 2 3 4	Περιμένετε την αλλαγή Λειτουργία καταμέτρησης Εναλλαγή μεταξύ kg και lb Ειδική λειτουργία κατά την αιμοκάθαρση Λειτουργία BMI (ιατρική)	1
05	W	Τρόπος λειτουργίας συγκράτησης Λειτουργία μόνο > Κενή τιμή	0 1 2 3 4 5 6	Μη ενεργός Συγκράτηση σε: Ακινησία Αφαίρεση από: Πατώντας το πλήκτρο ON Ακινησία Αφαίρεση φορτίου Μέγιστη τιμή Πατώντας το πλήκτρο ON Μέγιστη τιμή Αφαίρεση φορτίου Κινητός δείκτης Πατώντας το πλήκτρο ON Κινητός δείκτης Αφαίρεση φορτίου	0
06	W	Ρύθμιση φίλτρου	0 1 2 3 4	Πολύ γρήγορο φίλτρο Γρήγορο φίλτρο Κανονικό φίλτρο Αργό φίλτρο Πολύ αργό φίλτρο	2
07	W	Εκτυπωτής	0 1 2 3 4	Δεν υπάρχει εκτυπωτής Εκτυπωτής ταινίας Εκτυπωτής ετικετών TSP800 Μηχανογράφηση Προσαρμοσμένη εικόνα εκτύπωσης	1
08	W	Εξωτερικό εφεδρικό μέσο αποθήκευσης	0 1	Κανένα εξωτερικό εφεδρικό μέσο αποθήκευσης Εξωτερικό εφεδρικό μέσο αποθήκευσης	0
09	W	Σύμβολο διακοπής γραμμής	0 1 2 3	CR+LF CR LF Άνω τελεία	0
10	W	Δεκαδικό σημείο	0 1	Κόμμα Τελεία	0
11	W	Ρύθμιση δεδομένων H/Y με πλαίσιο STX-ETX	0 1	Μη ενεργό Ενεργό STX-ETX	0
12	W	Αρχική λειτουργία	0 1 2	Μη ενεργή Αρχικές τιμές, δεδομένα χρήστη Αρχικές τιμές, εικόνα εκτύπωσης	0

Μηνύματα

Αντιμετώπιση

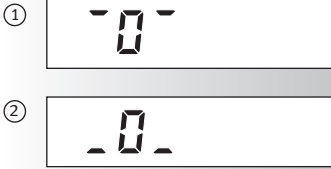

Κατά την ενεργοποίηση η ζυγαριά μηδενίζεται αυτόματα.
Το εύρος μηδενικών τιμών κατά την ενεργοποίηση κυμαίνεται μεταξύ -5% ... $+15\%$ του εύρους τιμών φορτίου.
Εάν η ζυγαριά βρίσκεται εκτός των ορίων αυτών, εμφανίζονται οι παρακάτω ενδείξεις.

- ① Απομακρύνετε το φορτίο από την πλατφόρμα ή ενεργοποιήστε το βαθμονομημένο μηδενικό σημείο πατώντας το πλήκτρο 
- ② Έχει προκύψει μηχανική ή ηλεκτρική βλάβη



Το φορτίο είναι πολύ μικρό

Η ζυγαριά δεν είναι κατάλληλη γι' αυτά τα βάρη



Ο μηδενισμός είναι αδύνατος

Υπέρβαση ορίων μηδενικής θέσης



Η ζύγιση του απόβαρου είναι αδύνατη

Δεν είναι δυνατό να υπολογιστεί απόβαρο για μηδενικές ενδείξεις ή αρνητικές τιμές.



Η εκτύπωση είναι αδύνατη σε περίπτωση υπέρβαρου ή λιποβαρούς φορτίου

Προσθέστε ή αφαιρέστε βάρος από την ζυγαριά




Η λειτουργία εναλλαγής μονάδων είναι απενεργοποιημένη

Ο τρόπος ενεργοποίησης περιγράφεται στις σελίδες 17/18



Για όλα τα άλλα μηνύματα σφάλματος, απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης της Soehnle Professional στην περιοχή σας.

Τεχνικά στοιχεία

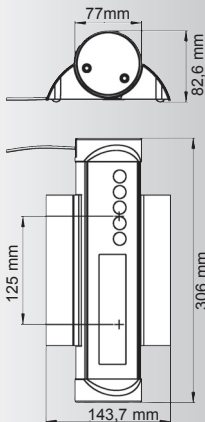

- Περιβλήμα από ανοδιωμένο αλουμίνιο
- Χειρισμός μέσω πληκτρολογίου αφής.
- Επιτραπέζια τροφοδοσία: είσοδος 230VAC / 50Hz / 60Ma, έξοδος 9VDC / 0.3A
- Τροφοδοτικό (προαιρετικό): είσοδος 100-240VAC / 50-60Hz / 0.3A, έξοδος ρεύματος φόρτισης για 4 μπαταρίες 0.5A, λειτουργική τάση: 9VDC / 0.3A
- Θερμοκρασία λειτουργίας -10° ... $+40^{\circ}$ C
- Θερμοκρασία αποθήκευσης -20° ... $+60^{\circ}$ C
- Εύρος μηδενικών τιμών -1% ... $+3\%$ του εύρους τιμών φορτίου (μέγιστο)
- Εύρος μηδενικών τιμών ενεργοποίησης -5% ... $+15\%$ του εύρους τιμών φορτίου.
- Θύρα RS232 (V24) για σύνδεση με τον εκτυπωτή ή τη μηχανογράφηση. Ζητήστε πληροφορίες για το λογισμικό από τον αντιπρόσωπο εξυπηρέτησης της Soehnle Professional στην περιοχή σας.

GR Με την επιφύλαξη για κάθε τεχνική τροποποίηση

SOEHNLE

PROFESSIONAL

Soehnle Professional GmbH & Co. KG

Manfred-von-Ardenne-Allee 12

DE-71522 Backnang

Telefon +49 (0) 71 91 / 34 53-0

Telefax +49 (0) 71 91 / 34 53-211

info@soehnle-professional.com

www.soehnle-professional.com