

# Roger Touchscreen Mic

Quick setup guide/ Schnellstartanleitung/  
Guide d'installation rapide/ Guía rápida de instalación





roger



**PHONAK**  
life is on

# Start

## Device description Produktbeschreibung Description de l'appareil Descripción del dispositivo

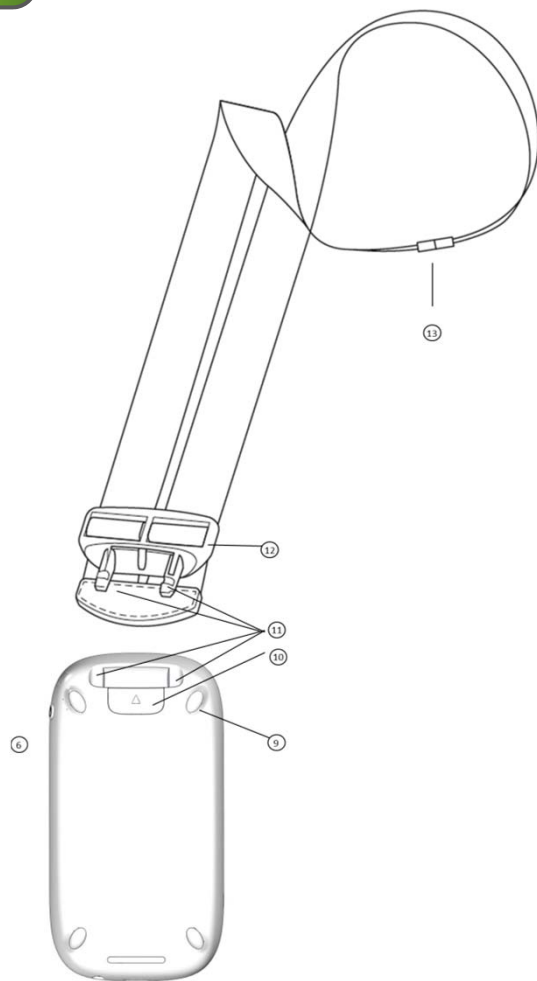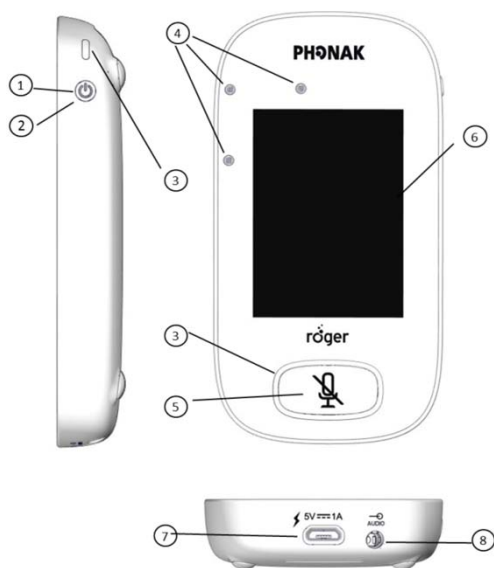


- ① On / Off
- ② wake/sleep; Stand-by; marche/veille; activación/reposo
- ③ LED
- ④ Microphones; Mikrofonen; microphones; micrófonos
- ⑤ Mute / Stumm / Mode sourdine / Modo silencio
- ⑥ Touchscreen display ; Multi-Touch Bildschirm; Ecran Multi-Touch; Pantalla Multi-Touch
- ⑦ micro-USB
- ⑧ Jack 3.5mm/ 1/8 "
- ⑨ Feet; Füße; pieds; pies
- ⑩ [Lanyard clip]: clip/remove button; Ein-/Aus-Taste; bouton mettre/enlever; botón encender/apagar
- ⑪ Lanyard snap clip
- ⑫ [Lanyard ]: length adjustment; Länge einstellen; adjustment longueur; ajustar longitud
- ⑬ [Lanyard ]: safety breakaway; Sicherheitsverschluss; bouton sécurité; botón de seguridad

# Start



Components  
Komponenten  
Composants  
Componentes



Roger Touchscreen Mic

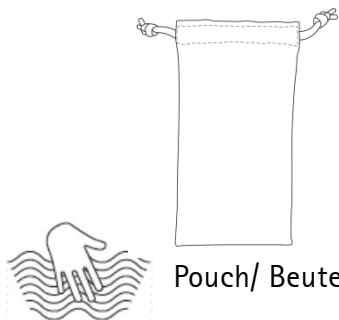


Pouch/ Beutel/ Poche/Bolso

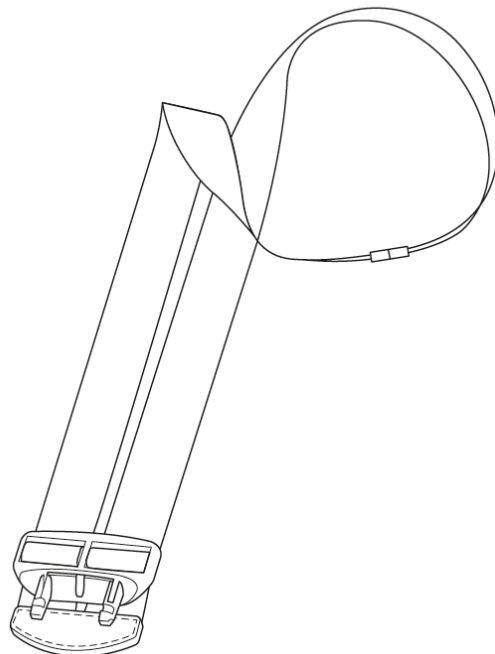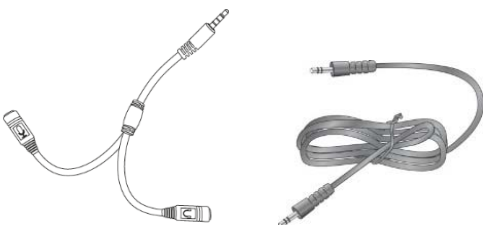



Package contents may vary slightly depending on country  
Die im Lieferumfang enthaltenen Komponenten können sich je nach Land geringfügig unterscheiden  
Le contenu peut varier selon les pays  
El contenido puede variar dependiendo del país

1

Charging  
Aufladen  
Charger  
Cargar

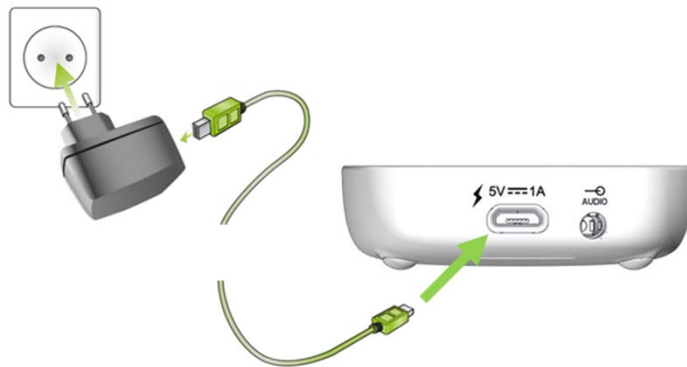

100%

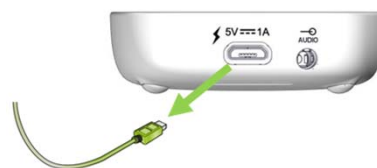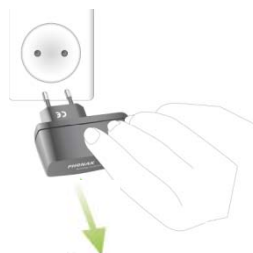

2




Switching on/off  
Ein-/Aus-schalten  
Mettre en marche/éteindre  
Encender/apagar



On  
Eingeschaltet  
Allumé  
Encendido



Touchscreen display  
Multi-Touch Bildschirm  
Ecran Multi-Touch  
Pantalla Multi-Touch

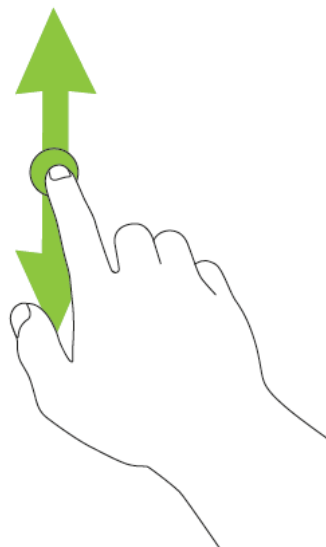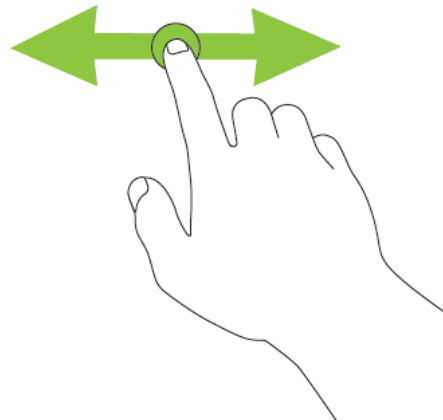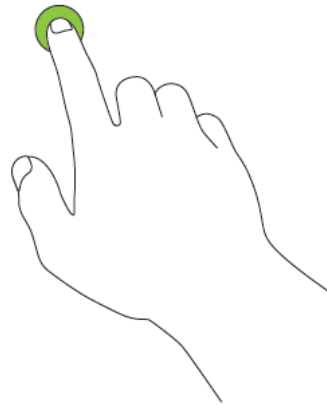


4

Connecting  
Verbinden  
Connecter  
Conectar



Roger Receiver


0-10 cm/  
0-4 inches

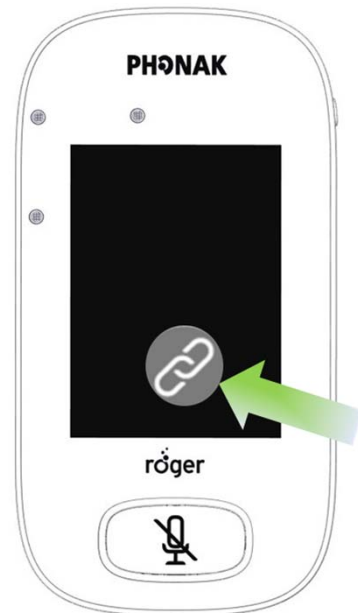


Roger Touchscreen Mic



Roger Pass-around

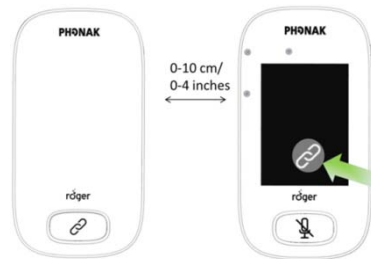

Roger Multimedia Hub

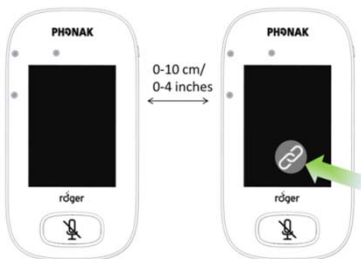


Roger Touchscreen Mic



Roger SoundField

5


Mute  
Stumm  
Sourdine  
Silenciar

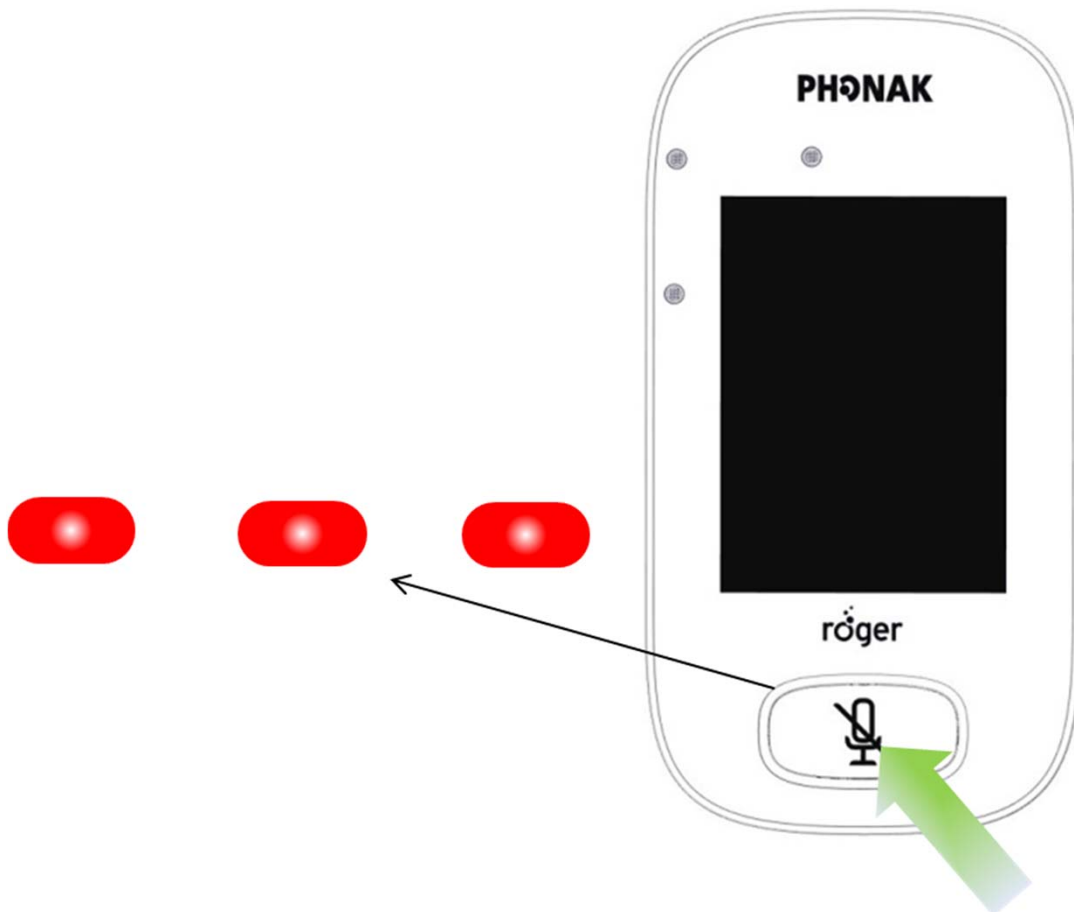




# 6

Wake  
Aktivierung  
Marche  
Activación

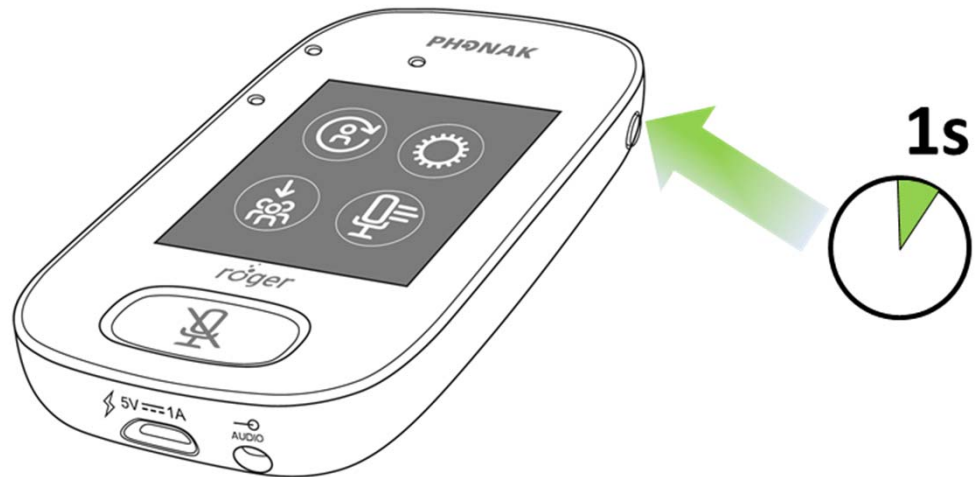






Sleep  
Stand-by  
Veille  
Reposo

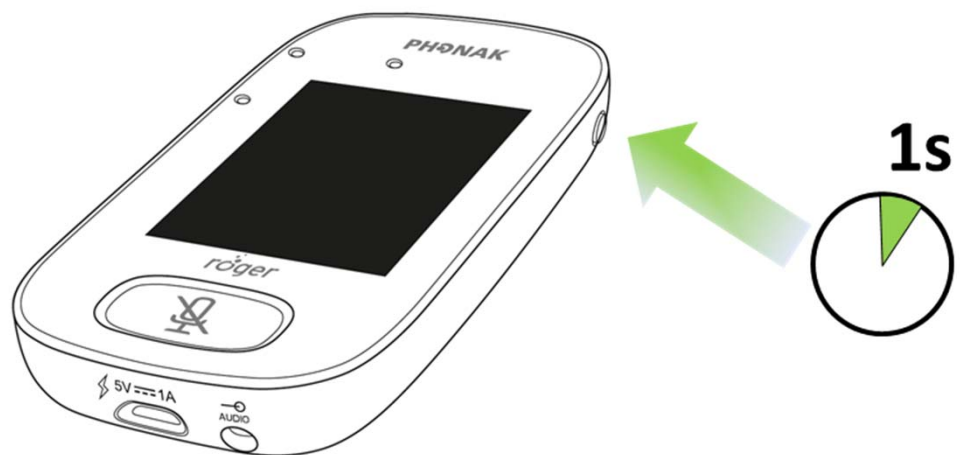

Microphone usage  
 Als Mikrofon verwenden  
 Utilisation comme microphone  
 Utilizar como micrófono



Automatic	✓
Small Group	
Pointing	
Lanyard	

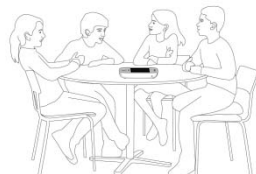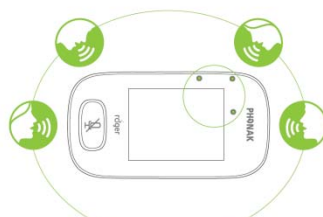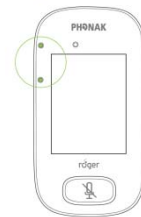
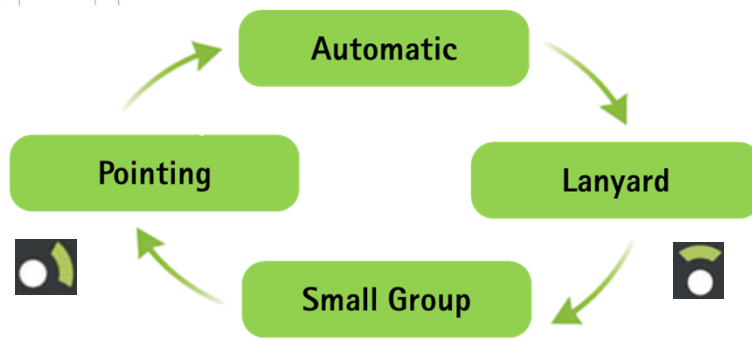
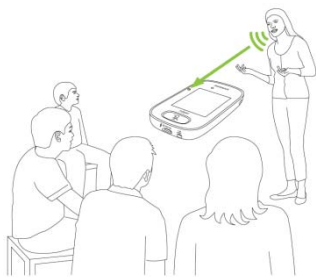


Lanyard: How to use


Lanyard: Benützen

Lanyard: Comment utiliser

Lanyard: Como utilizar

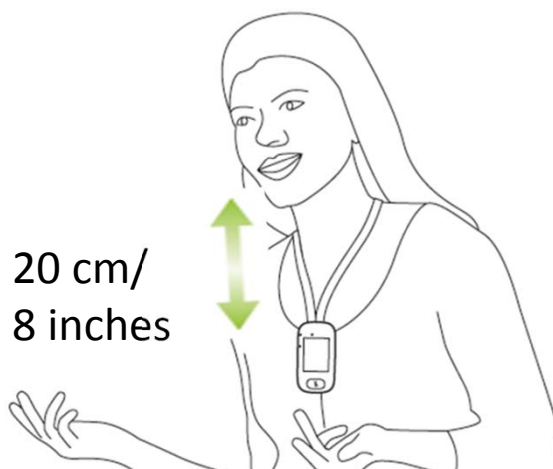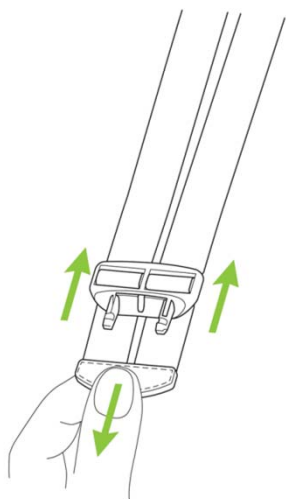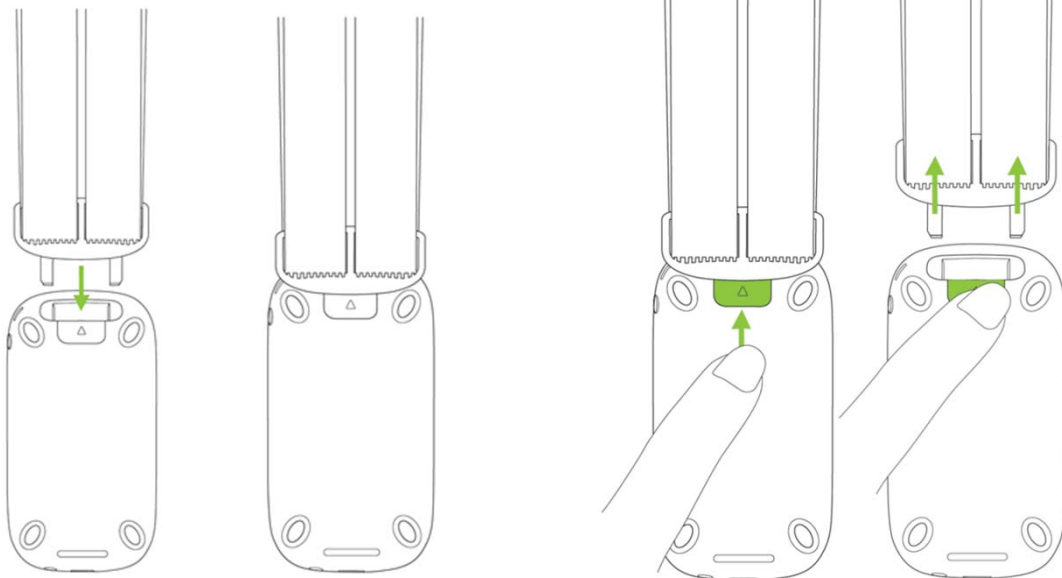


Recording: How to use  
Aufnahme: Benützen  
Enregistrement: Comment utiliser  
Grabación: Como utilizar

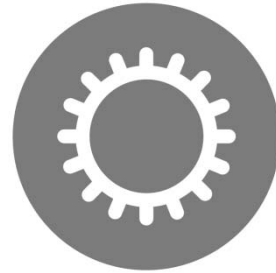**Audio**

Input

Output (tablet)

Output (computer) ✓

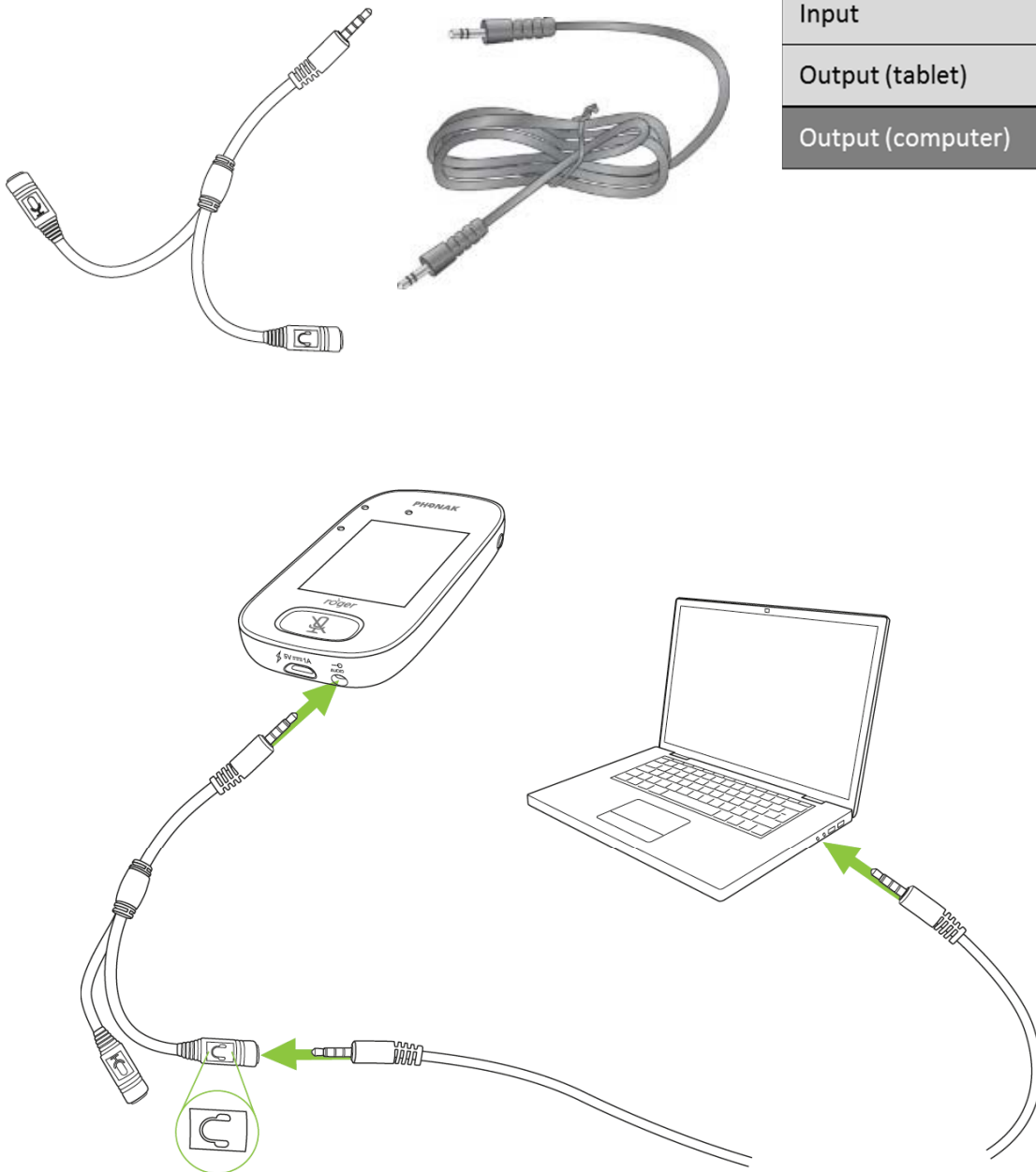



Indicator light (LED)  
Leuchtanzeige (LED)  
Témoin lumineux (LED)  
Indicador luminoso (LED)



3x

On/off



1s

1s

1s

Charging/ Aufladen/ Charge/ Cargar



Fully charged/ Voll aufgeladen/ complètement chargé/ Completamente cargado



1s

1s

1s

Mute / Stumm / Mode sourdine / Modo silencio



2s

2s

2s

Primary not available/ Primary nicht verfügbar/  
Primary indisponible/ Primario no disponible



Indicator light (LED)  
Leuchtanzeige (LED)  
Témoin lumineux (LED)  
Indicador luminoso (LED)



3x

On/ Off



1s

1s

1s


Charging/ Aufladen/ Charge/ Cargar



Fully charged/ Voll aufgeladen/ complètement chargé/ Completamente cargado



Switched on/ Eingeschaltet/ Allumé/ Encendido

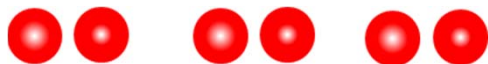


Recharge device / Gerät aufladen/ Recharger appareil/ Cargar dispositivo



Symbol  
Symbol  
Symbole  
Símbolo



Battery – Charging - Low

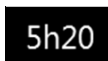

Remaining time for use/ Restnutzungdauer/ Temps d'utilisation restant/ Duración restante de utilización



Mic mode - Lanyard/Small Group/Pointing



Network, SubNet



MTN mode - Mixing, Primary / Equal Talker

Blank



Audio – Input, Output, Boom




USB



MTN role – Stand alone, Primary, Secondary

Blank

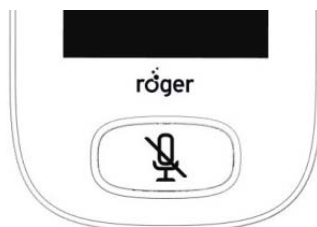

Screen progress



Quick view



Operating range  
Betriebsreichweite  
Plage de fonctionnement  
Alcance en funcionamiento



Roger Touchscreen Mic



20 m /  
65 feet

**Receivers/ Empfänger/  
récepteurs/ receptores**  
**Microphones/Mikrofone/  
microphones/micrófonos**



Out of range! If distance greater than 20 meters / 65 feet  
Ausser Reichweite! Wenn der Abstand größer als 20 Meter ist  
Hors de portée! Si distance supérieure à 20 mètres  
¡Fuera de alcance! Si la distancia es mayor que 20 metros




**Receivers/ Empfänger/  
récepteurs/ receptores**  
**Microphones/ Mikrofone/  
microphones/ micrófonos**





Reset  
Zurücksetzen  
Réinitialiser  
Reiniciar

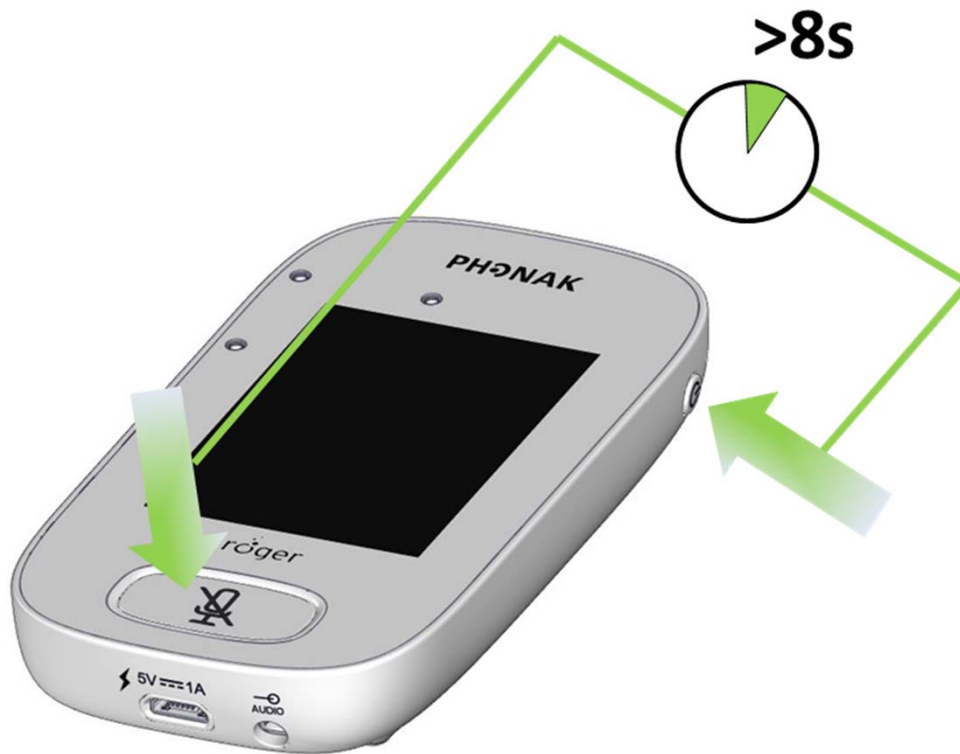



Only Roger transmitters running on software version 4.x are compatible with Roger Touchscreen Mic

Mit Roger Touchscreen Mic sind nur Roger Sender kompatibel, die über die Version 4.x verfügen

Seuls les transmitters Roger ayant la version 4.x ou plus élevée sont compatibles avec Roger Touchscreen Mic

Sólo emisores Roger que utilizan la versión de software 4.x y la siguientes son compatibles con Roger Touchscreen Mic

Operating conditions

Betriebsbedingungen

Conditions de fonctionnement

Condiciones de funcionamiento

0° to +45° Celsius (32° to +113° Fahrenheit)

<95% relative humidity / relative Luftfeuchtigkeit / humidité relative / humedad relativa

 >8 h

More/ Mehr/ Plus/ Más : [www.phonak.com](http://www.phonak.com)



Waste Electrical and Electronic Equipment Directive  
Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall Richtlinie  
Directive déchets d'équipements électriques et électroniques  
Instrucciones de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos



CE marking  
CE-Kennzeichnung  
Marquage CE  
Marca CE



Class II



Indoor use



Important to read  
Wichtig zu lesen  
Important de lire  
Importante de leer



ACMA – AUS/NZ



Phonak Communications AG  
Laenggasse 17  
CH-3280 Murten  
Switzerland

[www.phonak.com](http://www.phonak.com)



029-3210/V1.00/2016-04// ©Phonak Communications AG All rights reserved