

Guia do Usuário do Aplicativo Thrive Hearing Control para Android

Parabéns por iniciar sua jornada
para a melhor audição

thrive™



Introdução	4
Fazendo o Download	5
Emparelhando/Conectando	7
Tela Inicial	
Configurações	9
Ajuda	9
Status da Conexão	9
Thrive Assistant	9
Memória Atual	9
Pontuação Thrive*	9
Volume	10
Mudo	10
Navegação	10
Início	11
Menu de Memória	11
Telas de Personalização	
Equalizador	12
Fala em Ruído	12
Ruído Mecânico	13
Vento	13
Direcionalidade do Microfone	14
SoundSpace	14
Telas de Pontuação Thrive*	
Geral	15
Cérebro	15
Corpo	16

Detecção de Queda e Alertas*	17
Acessórios	19
Configurações	
Guia do Usuário	20
Configurações do Dispositivo	20
Pontuação Thrive*	21
Alerta de Queda*	21
Tradução*	22
Transcrição*	22
Autoverificação	23
Lembretes	23
Hearing Care Anywhere	25
Encontre Meus Aparelhos Auditivos	26
Configurações do Aplicativo	27
Sobre	27
Modo de Demonstração	27

Aparelhos auditivos compatíveis com Thrive



Acima estão os aparelhos auditivos da plataforma Thrive™ de 2.4 GHz que funcionam com o Aplicativo Thrive Hearing Control.

Android

O sistema operacional Android é responsável por gerenciar a conectividade entre os dispositivos Android e os aparelhos auditivos compatíveis com Thrive. O Aplicativo Thrive Hearing Control é uma ferramenta complementar para seus aparelhos auditivos, ele oferece uma variedade de recursos de aprimoramento. Com o Thrive, você pode personalizar seus aparelhos auditivos para que eles se adequem ao seu estilo de vida.

Para obter as informações de compatibilidade mais recentes, visite starkey.com/thrive-hearing

Faça o Download do Aplicativo Thrive Hearing Control para Dispositivos Android

O Aplicativo Thrive Hearing Control facilita o controle e ajuste de seus aparelhos auditivos com o seu dispositivo Android compatível. Baixar o aplicativo é fácil. Siga as instruções abaixo:

Passo Um: Em um dispositivo Android compatível, abra a “Google play Store”.



Passo Dois: Digite “Thrive Hearing Control” na área de pesquisa.

← Thrive hearing control 🔍

Passo Três: Toque em “OBTER” para fazer o download do aplicativo para o seu dispositivo. Siga as instruções na tela para instalar o aplicativo.

OBTER

Passo Quatro: Depois que o aplicativo for instalado, abra o Aplicativo Thrive Hearing Control na tela inicial ou na Lista de Aplicativos.



Iniciar/Configuração

Após a primeira execução do Aplicativo Thrive Hearing Control, será solicitado várias vezes que você confirme o contrato de licença e a política de privacidade, além de personalizar as configurações do aplicativo. Você poderá configurar notificações, escolher entre o modo básico ou avançado e configurar uma conta na nuvem para o recurso Hearing Care Anywhere™.

Conectividade para Dispositivos Android

Siga as instruções abaixo para conectar seus aparelhos auditivos ao seu dispositivo Android. Se o seu aparelho auditivo perder a conexão com o dispositivo, repita as instruções abaixo para reconectar.


1. Inicie o aplicativo Thrive.
2. Após a pesquisa, os aparelhos auditivos disponíveis serão exibidos na tela. Observe que cada aparelho auditivo aparecerá separadamente.
3. Marque a caixa ao lado de cada aparelho auditivo e selecione **Conectar**.

NOTA: O emparelhamento ainda pode ser concluído através do menu Bluetooth® do seu dispositivo Android, se preferir.

Reconectando seus aparelhos auditivos ao seu Dispositivo Android

Quando você desliga seus aparelhos auditivos ou o dispositivo Android, eles não continuarão conectados. Para reconectar, ligue o dispositivo Android e ligue os aparelhos auditivos.

Os aparelhos auditivos irão se conectar automaticamente ao seu dispositivo Android. Se estiver com problemas para reconectar seus aparelhos auditivos e o aplicativo, verifique as configurações de Bluetooth no seu dispositivo Android para garantir que seus aparelhos auditivos ainda estejam emparelhados. Caso contrário, repita o processo de emparelhamento.

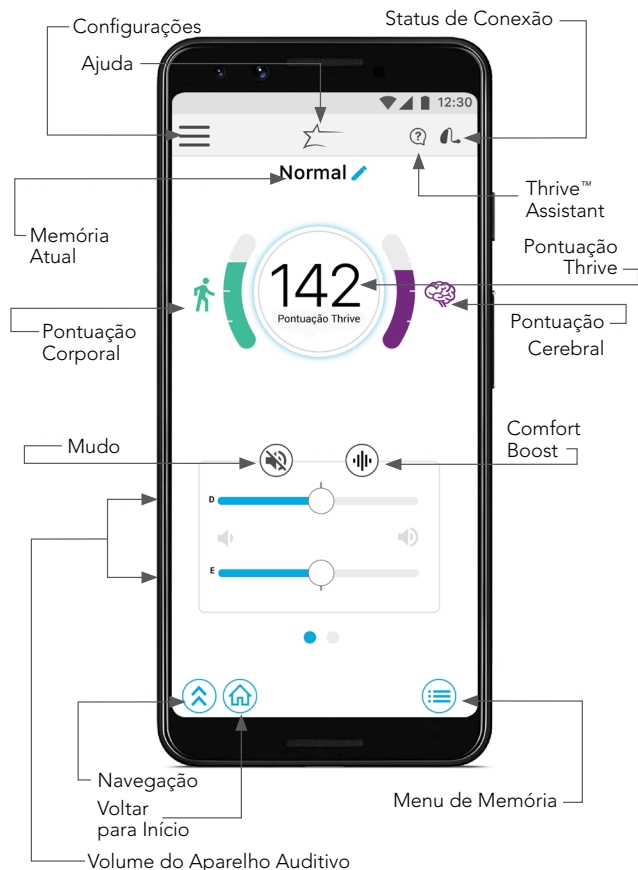

Configurações

Toque para abrir o menu. Consulte a seção Configurações para encontrar uma descrição completa.

Ajuda

O recurso Ajuda explica a função de cada tela disponível. Toque no ícone de **Estrela** na parte superior da tela para obter ajuda para uma tela específica. Todos os arquivos de ajuda podem ser encontrados em [Configurações > Guia do Usuário](#).

Status de Conexão

Toque para visualizar o status atual da conexão dos seus aparelhos auditivos.

Thrive Assistant*

Você pode ativar um assistente de voz no aplicativo Thrive para fazer uma pergunta como: "Como personalizo as minhas configurações dos aparelhos auditivos?" O Thrive Assistant usa o microfone do telefone para ouvir sua pergunta e, em seguida, fornece uma resposta por meio de um arquivo de ajuda ou de serviços na nuvem. O Thrive Assistant pode ser acionado por meio do ícone no aplicativo Thrive ou por um toque duplo em seu aparelho auditivo com AI.

Memória Atual

A memória que você está usando atualmente é exibida aqui.

**Requer uma conta na nuvem.*

**Os recursos podem variar por país*

Pontuação Thrive

Um resumo do bem-estar corporal e cerebral. Isso aparecerá apenas quando estiver usando aparelhos auditivos com AI.

Volume


Aumente/diminua o nível de volume dos seus aparelhos auditivos, deslizando o indicador de cada lado ou usando o controle deslizante geral (entre os controles deslizantes esquerdo e direito) para ajustar os dois lados simultaneamente. Toque duas vezes em qualquer lugar do controle geral para retornar o volume ao nível padrão definido pelo seu profissional da audição.

Mudo

Toque no botão Mudo para que os microfones dos dois aparelhos auditivos fiquem mudos. Toque nele novamente para ativar os microfones dos aparelhos auditivos.


Navegação

O ícone Navegação fornece acesso as seções mais usadas, Acessórios, Pontuação Thrive (para aparelhos auditivos AI), Personalizar e Início.

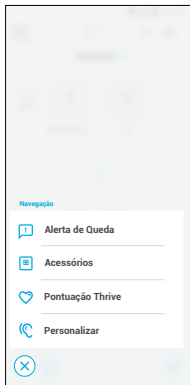


Início

Toque no ícone Início para retornar á tela principal.

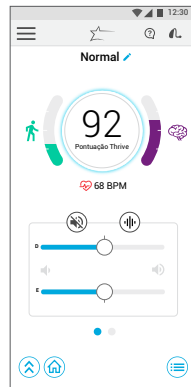

Menu de Memória

Toque no ícone do Menu de Memória para visualizar e selecionar as memórias disponíveis ou para criar uma nova memória.

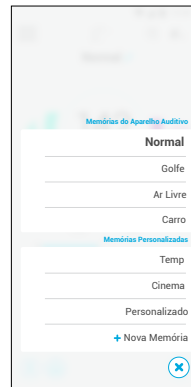


Telas de Personalização

Toque em Personalizar para obter acesso a uma variedade de controles para personalizar suas memórias do aparelho auditivo.

Equalizador

Personalizar oferece barras de equalização para várias faixas de frequência. Você pode deslizar para cima ou para baixo para ajustar a sua qualidade de som preferida. Você pode ajustar de forma diferente em cada memória.

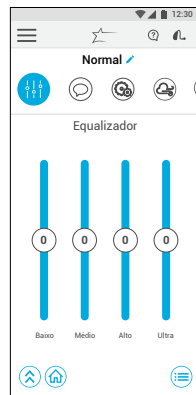


Fala em Ruído

Fala em Ruído reduz a quantidade de ruído de fundo que entra em seus aparelhos auditivos. Você pode ajustar isso individualmente em cada memória do aparelho auditivo. Colocar mais na direita proporciona mais conforto durante o ruído. O bloco azul exhibe a configuração atual.




Ruído Mecânico

Ruído Mecânico reduz os sons produzidos por máquinas para aumentar seu conforto em ambientes ruidosos. Colocar mais na direita proporciona mais conforto durante o ruído. O bloco azul exhibe a configuração atual.

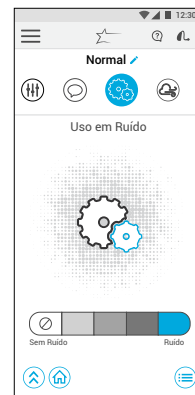

Vento

A seção Vento fornece controle para reduzir o som do ruído do vento soprando nos microfones do aparelho auditivo. Colocar mais na direita proporciona mais conforto durante o ruído. O bloco azul exhibe a configuração atual.

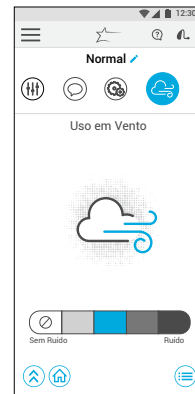


Direcionalidade do Microfone

A Direcionalidade do Microfone fornece a capacidade de controlar o som ao seu redor em cada memória. Use esta opção para melhorar a sua capacidade de ouvir conversas, focando o microfone nos sons em frente a você. O modo automático segue sons de fala com base nos níveis de ruído.



SoundSpace

SoundSpace™ permite transformar seu dispositivo Android em uma ferramenta de ajuste de configurações personalizadas para seus aparelhos auditivos. Ele fornece a capacidade de modificar a resposta de qualquer uma das suas memórias Thrive personalizadas para se adequarem melhor a um ambiente específico. À medida que você move o dedo pela tela em branco, as configurações dos seus aparelhos auditivos mudam temporariamente para que você possa ouvir uma variedade de opções.

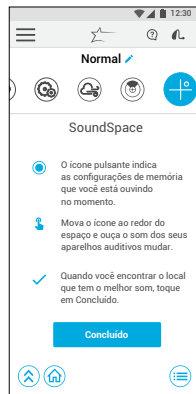

Pontuação Thrive*

A Pontuação de Bem-Estar **Geral** Thrive é uma combinação das pontuações Corporais e Cerebrais. Você pode atingir uma pontuação de 200 por dia.

Monitoramento **Cerebral** é composto por três segmentos. Cada segmento possui um valor em pontos para exibir como você está usando seus aparelhos auditivos. O aplicativo Thrive lê dados de uso dos seus aparelhos auditivos e exibe seus pontos de progresso do dia. Seu objetivo é 100 pontos por dia.

Pontuação de Uso são pontos ganhos ao usar seus aparelhos auditivos diariamente. Quanto mais você os usa, mais pontos ganha (40 pontos possíveis).

Pontuação de Engajamento são pontos ganhos ao usar seus aparelhos auditivos para conversar com outras pessoas. Quanto mais tempo é gasto em ambientes com fala conversacional, mais pontos são ganhos (40 pontos possíveis).

Pontuação de Audição Ativa são pontos ganhos quando os aparelhos auditivos se adaptam a ambientes auditivos desafiadores (20 pontos possíveis).



*Para aparelhos auditivos AI.

Monitoramento **Corporal** é composto pelo progresso nas três metas diárias de atividade física. Completar os três objetivos resultará em todos os 100 pontos. O aparelho auditivo monitora passos e os dados são transmitidos para o aplicativo ao longo do dia. Você pode definir/modificar as metas nas Configurações.

Passos exibe o seu progresso em direção à meta diária de passos (40 pontos possíveis).

Atividade exibe seu progresso em direção à sua meta diária de exercício (40 pontos possíveis).

Movimento exibe seu progresso com a meta de se movimentar a cada hora (20 pontos possíveis).



NOTA: Os aparelhos auditivos devem conectar-se regularmente ao telefone durante o dia e o aplicativo Thrive deve ser mantido aberto em segundo plano no telefone.


Detecção de Queda e Alertas*

O recurso de Alerta de Queda pode ser usado para enviar uma mensagem de alerta contendo sua localização GPS para contatos selecionados, caso você caia ou sofra um evento não relacionado à queda. O Alerta de Queda pode ser configurado para enviar alertas automatizados e/ou iniciados manualmente.

Alerta Automático permite que os sensores em seus aparelhos auditivos detectem uma queda automaticamente.

Alerta Manual permite que você “pressione e segure” o controle de usuário dos aparelhos auditivos para enviar uma mensagem de alerta.

Uma mensagem de alerta será enviada pelo aplicativo Thrive quando uma queda for detectada automaticamente ou iniciada manualmente por você. A mensagem de texto será enviada para um máximo de três contatos predefinidos, que podem confirmar o recebimento da mensagem e visualizar um mapa que indica sua localização.

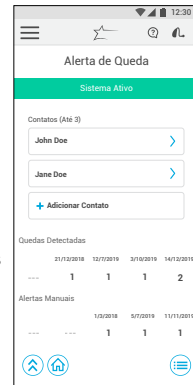

*Para aparelhos auditivos AI.

Cancelamento do Alerta permite cancelar um Alerta Automático ou Alerta Manual a partir dos seus aparelhos auditivos ou do seu smartphone. Para cancelar uma mensagem de alerta a partir do seu aparelho auditivo, pressione o controle de usuário do aparelho auditivo. Você será informado sobre o cancelamento no aplicativo Thrive e através de um indicador de fala nos seus aparelhos auditivos. As mensagens de Alerta de Queda podem ser canceladas dentro de 60 ou 90 segundos conforme pré-selecionado após o início do alerta.

Você pode identificar até três **contatos** para os quais deseja enviar mensagens de texto de alerta. Você deve inserir o nome e o número do celular para cada contato no aplicativo Thrive em seu smartphone. Cada um dos seus contatos receberá uma mensagem de texto solicitando que eles confirmem a participação no seu sistema de Alerta de Queda.

Acessórios

O aplicativo Thrive fornece a capacidade de controlar a transmissão de áudio da maioria dos acessórios Starkey Hearing Technologies™. Estes acessórios emparelham diretamente com seus aparelhos auditivos. No aplicativo, você pode selecionar um acessório emparelhado, iniciar e interromper a transmissão de áudio e controlar o volume da transmissão e dos sons do ambiente.



Guia do Usuário

Uma visão geral de cada tela/recurso está disponível no aplicativo Thrive. Cada seção exibe detalhes das telas e descreve suas funções.

Configurações do Dispositivo

As configurações avançadas dos seus aparelhos auditivos podem ser ativadas/desativadas ou definidas nesta área.

Gesto de Toque* permite ativar ou desativar o gesto de toque, definir a sensibilidade e definir qual recurso será ativado pelo gesto de toque (Thrive Assistant ou Iniciar/Interromper a Transmissão do Acessório).

Transmissão Automática permite que seus aparelhos auditivos reconheçam quando uma transmissão de áudio é iniciada e troquem automaticamente para uma memória diferente e ajustem uma redução de microfone de áudio.

Comfort Boost permite que seus aparelhos auditivos reduzam agressivamente o ruído enquanto otimizam a qualidade do som em ambientes ruidosos.

Alertas permite que o seu aparelho auditivo toque um tom de alerta para determinadas notificações do celular, como eventos da agenda, emails e mídias sociais.

Ligar/Desligar* economiza energia da bateria de forma automática quando você não estiver usando seus aparelhos auditivos. Retire os aparelhos auditivos da orelha, coloque-os em uma superfície plana e estável, e eles entrarão no modo de baixa energia após

**Para aparelhos auditivos AI.*

15 minutos. Coloque seus aparelhos auditivos novamente para que eles retornem ao modo normal.

Pontuação Thrive*

Seção de Configurações para a Pontuação Thrive. Você pode adicionar/atualizar seus dados demográficos para que seu monitoramento de passos seja mais preciso. Além disso, você pode definir/modificar as metas de Passos, Atividade e Movimento.

Alerta de Queda*

A sensibilidade do **Alerta Automático** permite ajustar a sensibilidade do Alerta Automático no aplicativo Thrive. Aumentar a sensibilidade aumenta a probabilidade de uma queda ser detectada. Diminuir a sensibilidade pode ajudar a reduzir a probabilidade de alertas falsos.

Perfil permite modificar as informações do seu perfil.

Indicadores de **Alerta Automático** e **Alerta Manual** permitem revisar e demonstrar os indicadores de Alerta de Queda para que exista familiaridade caso uma queda aconteça.

Contatos permite que você adicione, edite ou exclua um contato.


Temporizador de Cancelamento permite selecionar o tempo de atraso entre a detecção de queda e o envio da mensagem de alerta, sendo 60 ou 90 segundos como opções de tempo.

Mensagem de Alerta permite editar seu nome e exibe um exemplo de mensagem de alerta.

**Para aparelhos auditivos AI.*


Tradução*

Tradução é um recurso que permite que você selecione o seu idioma e o idioma de outro orador para iniciar uma conversa. Quando você fala próximo ao telefone, o aplicativo traduz sua fala e exibe no idioma da outra pessoa. Quando a outra pessoa falar próxima ao telefone, o aplicativo traduzirá a fala, exibirá em seu idioma e transmitirá** o texto traduzido para seus aparelhos auditivos.

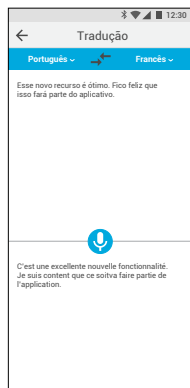

Transcrição*

Transcrição é um recurso que permite que você tenha legendas nas situações do mundo real. Quando você ou outras pessoas falarem próximas ao telefone, o aplicativo Thrive transcreverá as falas e exibirá na tela do celular. Há também a opção de salvar o texto transcrito, enviar como mensagem, copiar ou enviar por e-mail.

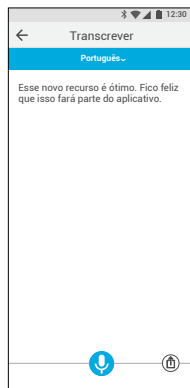


*Para aparelhos auditivos AI.

**A transmissão de áudio é compatível com determinados dispositivos Android. A transmissão também é suportada com o uso de um Microfone Remoto + ou Mini Microfone Remoto.

Autoverificação


Autoverificação fornece uma maneira rápida e conveniente para os pacientes analisarem o desempenho de seu sistema de aparelhos auditivos. Com a Autoverificação, você pode executar diagnósticos de desempenho dos componentes dos seus aparelhos auditivos, incluindo microfone, receptor, circuito e sensores.

Autoverificação exibirá o desempenho dos componentes e fornecerá instruções de manutenção, se necessário (a maioria dos problemas ocorre devido a cera/detrítos e pode ser resolvida facilmente). O seu profissional da audição fará a configuração inicial da Autoverificação para estabelecer a referência.

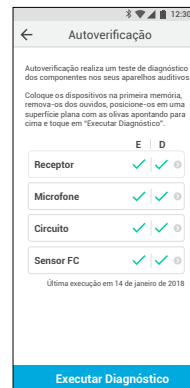

Lembretes

O recurso de Lembretes pode ajudar a lembrar eventos importantes em sua vida agitada, sem que você precise se lembrar de tudo.


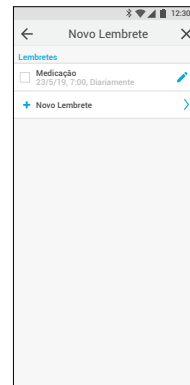


Você pode configurar notificações de lembrete visuais em seu smartphone e/ou notificações de lembrete sonoras transmitidas de seu smartphone* para seus aparelhos auditivos, essas notificações podem ser para várias tarefas, por exemplo: lembretes de medicamentos, limpar seus aparelhos auditivos, fazer exercícios e beber água.

Além disso, você pode personalizar seus lembretes, por exemplo: tomar remédios para pressão arterial, passear com o cachorro, ligar para o fisioterapeuta ou levar uma garrafa de água e um tapete para o yoga. Depois de definir o nome, a data e a hora do lembrete, você pode selecionar a opção para repetir esse lembrete diariamente, semanalmente, mensalmente ou anualmente.

E você não precisa se preocupar se não conseguir realizar a tarefa no momento em que receber seu lembrete, tarefas atrasadas serão exibidas em vermelho na tela Lembretes até você desmarcá-las.

**A transmissão de áudio é compatível com determinados dispositivos Android. A transmissão também é suportada com o uso de um Microfone Remoto + ou um Mini Microfone Remoto.*

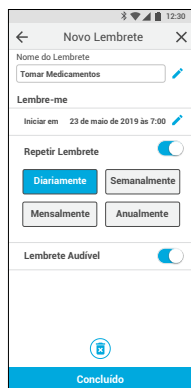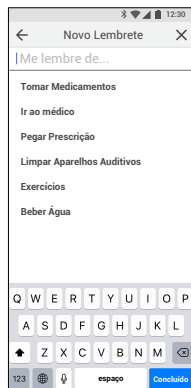

Hearing Care Anywhere

Criando uma Conta

O Hearing Care Anywhere exige que você crie sua conta. Por meio dessa conta, seus aparelhos auditivos podem realizar um backup e sincronizar entre vários telefones. Você pode criar uma conta durante o processo de instalação ou mais tarde, se desejar. Você pode criar uma conta usando uma conta existente do Facebook ou do Google ou também pode criar sua conta usando um email e uma senha de sua escolha.

Backup


Quando você faz alterações usando o aplicativo Thrive, essas alterações são salvas na sua conta da nuvem para fazer backup em tempo real de suas configurações.

Ajustes Remotos

O seu profissional da audição pode ativar a programação remota. Isso permite que você solicite ajustes e ajude a melhorar sua experiência auditiva sem precisar ir até o local de atendimento.


Avaliação dos Pacientes

Quando você interage com seu profissional da audição através do Hearing Care Anywhere para solicitar e receber ajustes remotos, você pode fornecer feedback sobre sua satisfação com as alterações de programação sugeridas. Será solicitado que você avalie como os aparelhos auditivos estão e a classificação será enviada ao seu profissional da audição para garantir sua satisfação.

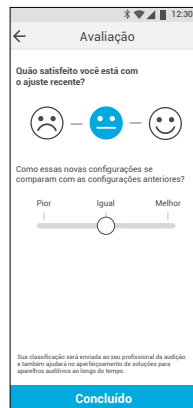

Encontre Meus Aparelhos Auditivos

O recurso Encontre Meus Aparelhos Auditivos permite você rastreie o último local registrado de seus aparelhos auditivos em um mapa. Quando o recurso Encontre Meus Aparelhos Auditivos for acessado, você verá um mapa com uma nota mostrando o local em que seus aparelhos auditivos foram registrados pela última vez. Se os seus aparelhos auditivos estiverem conectados no momento (ou se tornem conectados durante), as barras na parte inferior da tela irão indicar o quão perto ou longe você está dos aparelhos auditivos.

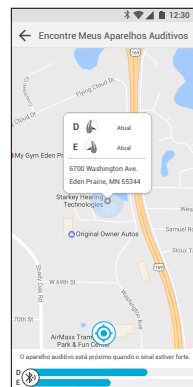

Configurações do Aplicativo

Opções em Configurações do Aplicativo incluem a capacidade de alternar entre os modos Básico ou Avançado e redefinir completamente todas as configurações do aplicativo Thrive. O modo Avançado tem funcionalidades completas para todos os recursos do aplicativo, enquanto o modo Básico possui um conjunto das funcionalidades básicas.

Sobre

Fornece informações sobre a Starkey Hearing Technologies, o Contrato de Licença do Usuário Final, a política de privacidade e a versão do aplicativo. Há também uma seção para fornecer feedback.

Modo de Demonstração

Coloca o aplicativo Thrive no Modo de Demonstração, permitindo que o aplicativo funcione sem nenhum aparelho auditivo conectado, para que todos os recursos fiquem visíveis para demonstração. Os ajustes feitos no Modo de Demonstração não serão aplicados aos seus aparelhos auditivos.

[illegible][illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

Para informações de compatibilidade do Aplicativo Thrive com iOS/Android, visite starkey.com/thrive-hearing.

Android e Google Play são marcas registradas da Google Inc.



A marca e o logotipo Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e todas as utilizações dessas marcas pela Starkey são licenciadas.



www.starkey.com

