


Application Thrive Hearing Control

Mode Avancé

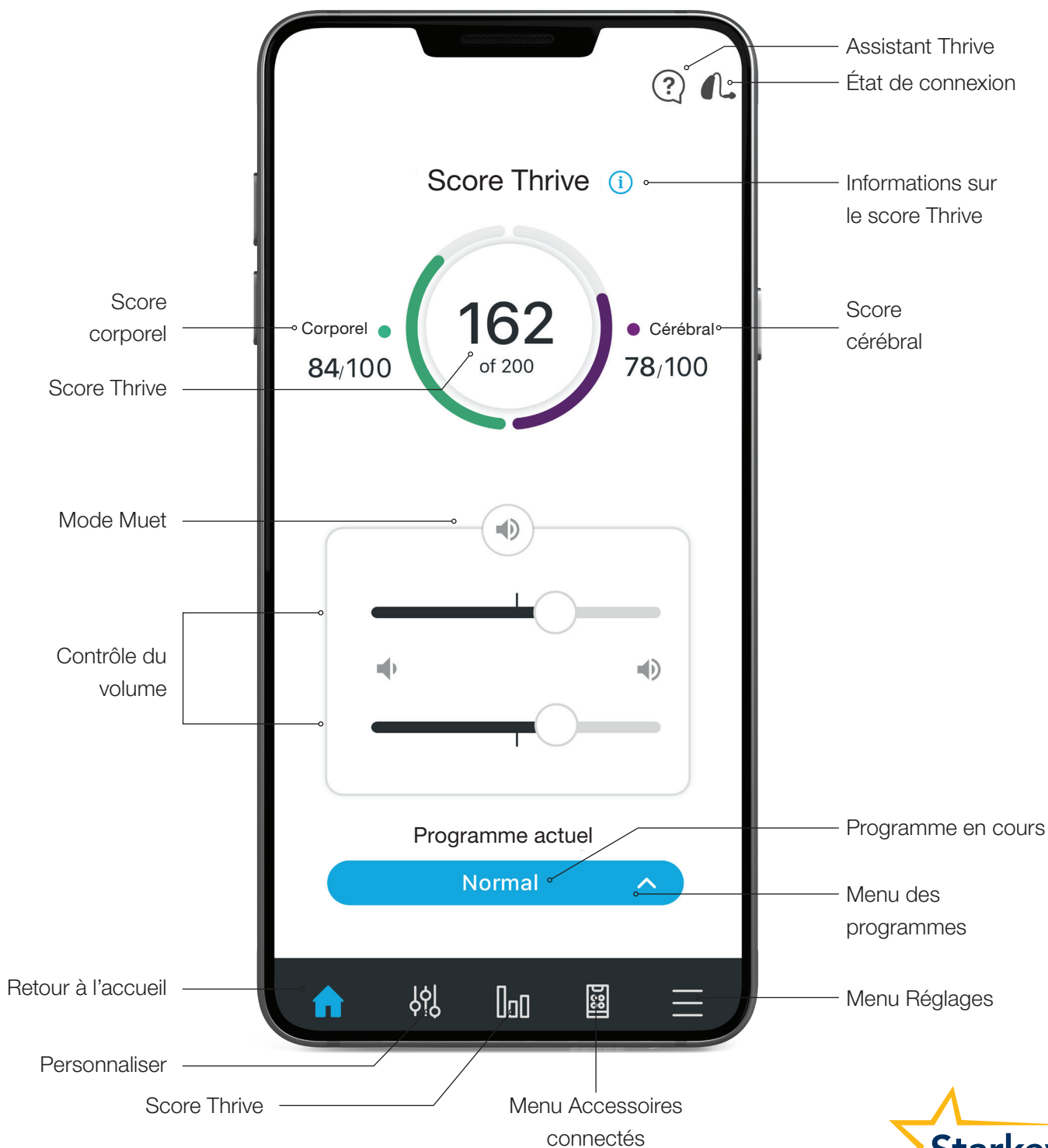


Programmes auditifs


Créer un nouveau programme


Sélectionnez le programme offrant la meilleure qualité sonore pour l'environnement d'écoute actuel. Le programme sélectionné sert de référence pour les ajustements.

Pour créer un programme

personnalisé, allez dans :

- 1 **Menu des programmes**
- 2 **+ Créer un nouveau programme**
- 3 **Nom du programme**
- 4 **Paramètres de localisation**
- 5 **Localisation définie** : Un repère indique la localisation actuelle. Appuyez sur  (en bas du plan) pour attribuer un repère de géolocalisation.

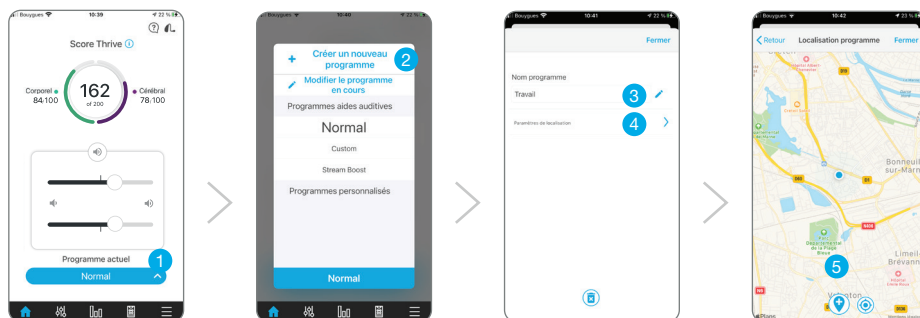

«Temp» Tout ajustement d'un programme défini par l'audioprothésiste dans Inspire X sera automatiquement enregistré sous « Temp ». Appuyez sur le menu Programmes, puis sélectionnez  **Modifier le programme en cours** pour le nommer et l'enregistrer dans la liste des programmes personnalisés en vue d'une utilisation ultérieure.


Potentiomètre intelligent La position du volume est enregistrée et définie pour les programmes personnalisés afin d'offrir une expérience utilisateur plus cohérente.

Mode Masque


Le mode Masque met l'accent sur un interlocuteur qui porte un masque de protection. Ajoutez le **programme Masque** à la liste des programmes personnalisés pour y accéder facilement.


Pour ajouter le programme Masque :

- 1 Appuyez sur le **menu Réglages** dans la barre de navigation.
- 2 Appuyez sur **Réglages appareil**.
- 3 Appuyez sur le curseur situé en regard du **mode Masque**.
- 4 Le programme Masque sera désormais disponible dans le menu Programmes, dans la liste des **programmes personnalisés**.

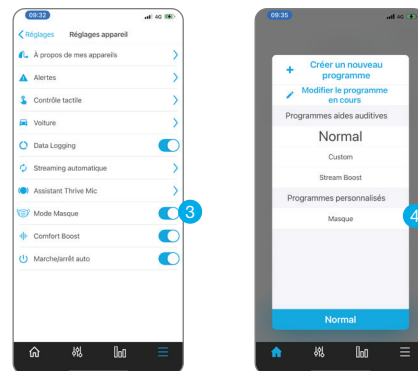

Personnaliser un programme

Plusieurs fonctions sont disponibles pour personnaliser un programme et allier confort et clarté sonore dans différents types d'environnement. Pour plus de personnalisation, sélectionnez **Personnaliser**  dans la barre de navigation.

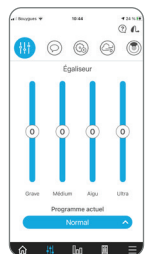


Égaliseur

Permet, grâce aux curseurs, d'affiner encore les réglages de programme.



Utiliser avec Parole

Améliore la compréhension vocale en présence de bruit de fond.

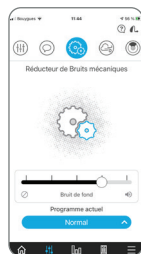

Réducteur de Bruits mécaniques

Makes listening more comfortable when machine-type noise is present.



Réducteur de bruit de Vent

Rend l'écoute plus confortable dans les zones venteuses.



Direction micro

Permet d'orienter les microphones en direction du son à capter. Appuyez sur l'icône pour choisir :

Devant

Amplifie le son devant plutôt que derrière.

Partout

Amplifie uniformément le son provenant de toutes les directions.

Transition

Bascule automatiquement entre Devant et Partout selon l'environnement.

Automatique

Grâce à un système d'atténuation adaptative, préserve la parole tout autour de l'utilisateur.



SoundSpace

Déplacez l'icône clignotante sur l'écran. La qualité sonore sera modifiée en temps réel. Appuyez sur Terminé dans le coin supérieur gauche de l'écran une fois que la qualité sonore vous convient.

Score Thrive

Le score Thrive établit le lien entre santé auditive et santé physique et cognitive en combinant un score corporel et un score cérébral. Il est possible d'atteindre un score total quotidien de 200 points.¹



Score corporel

Marcher, Bouger et Se lever composent le score corporel. Le score maximal quotidien est de 100 points.



Marcher

Vous pouvez améliorer votre condition physique générale simplement en marchant.




Bouger

Vous pouvez améliorer votre état de santé général et réduire le risque de développer des maladies graves en pratiquant une activité physique.



Se lever

Adoptez un mode de vie actif en vous levant toutes les heures.

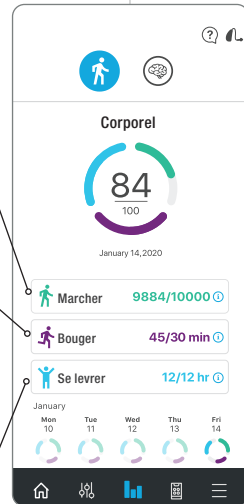

Score cérébral

Le nombre d'heures cumulées quotidiennement pour Utilisation, Activités sociales et Environnement composent le score cérébral. Le score maximal quotidien est de 100 points.

Utilisation



Une utilisation continue des aides auditives peut réduire le risque de développer d'autres maladies graves.

Activités sociales

La sociabilité et la connectivité favorisent les interactions avec le monde qui nous entoure.

Environnement


L'effort d'écoute est réduit au fur et à mesure que les aides auditives s'adaptent à différents environnements d'écoute complexes.

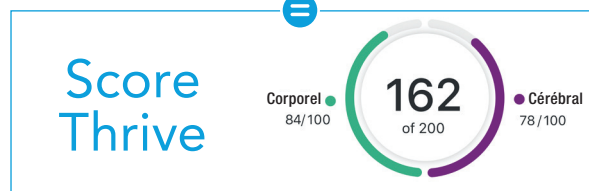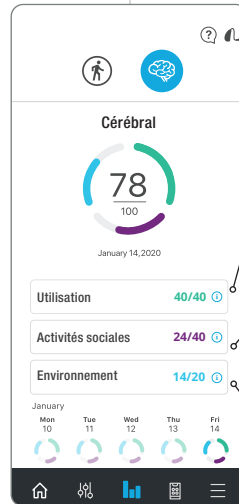

Alerte de chute

Grâce à des capteurs intégrés, la fonction Alerte de chute détecte automatiquement les chutes et envoie des messages d'alerte aux contacts sélectionnés.

Pour en savoir plus, consulter les QuickTIPs Détection et alertes de chute, Inspire X, Configuration du système et Guide d'utilisation.

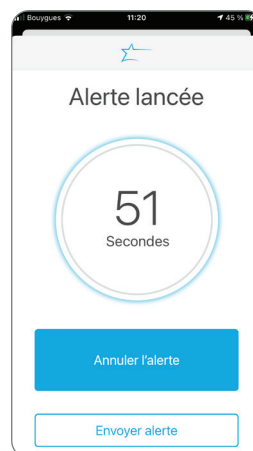

Alerte auto


Une chute est détectée et une alerte automatiquement déclenchée.

Alerte manuelle


L'alerte est déclenchée en appuyant sur le contrôle utilisateur.


Accessoires

Vous pouvez voir les accessoires jumelés dans l'application Thrive.²

Pour accéder à **IntelliVoice** appuyez sur . Grâce à la puissance de l'intelligence artificielle, cette fonction évolutive d'amélioration de la compréhension de la parole offre une expérience inégalée aux personnes atteintes d'une surdité modérée (perte de 50 dB HL ou plus). Disponible avec la technologie Edge AI et iOS uniquement.


Sélectionnez un accessoire pour :



- Démarrer/arrêter le streaming audio
- Régler le volume du son transmis
- Régler le niveau des microphones d'aide auditive pendant le streaming
- Modifier le nom de l'accessoire en appuyant sur  près du bouton de l'accessoire
- Supprimer un accessoire jumelé

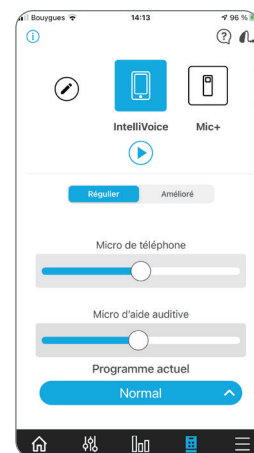

Assistant Thrive

L'Assistant Thrive est un assistant intégré dans l'application qui vous offre une aide mains-libres quand et où vous en avez besoin. Les utilisateurs peuvent facilement poser des questions, résoudre les problèmes rencontrés avec leurs aides auditives et accessoires ou formuler une commande vocale pour régler le volume de leurs aides auditives, activer le mode muet, changer de programme ou programmer un rappel. Les utilisateurs peuvent même dire « Trouver mon téléphone » ou « J'ai perdu mon téléphone » et l'Assistant Thrive les aidera à localiser leur smartphone égaré en le faisant sonner, même s'il est verrouillé ou en mode silencieux.

- 1 Appuyez sur l'icône  dans le coin supérieur droit de l'application Thrive pour accéder à l'Assistant Thrive.
- 2 L'Assistant Thrive affichera : *“J’écoute, veuillez poser votre question.”*
- 3 Formulez une commande vocale ou posez une question. L'Assistant Thrive exécutera la commande, ou cherchera et apportera une réponse appropriée à la question à partir des fichiers d'aide Thrive ou services Cloud.

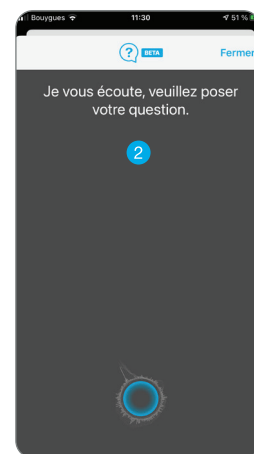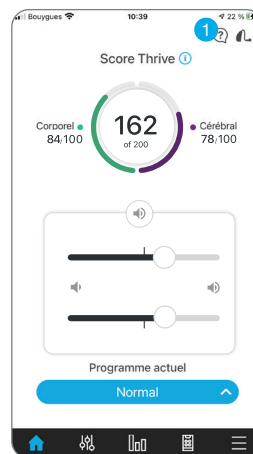

Pour en savoir plus, consulter le QuickTIP Assistant Thrive.

Traduire


Se connecte aux services Cloud pour traduire d'une langue vers l'autre.

Lorsque l'utilisateur parle dans le microphone du téléphone, sa langue est traduite et retranscrite à l'écran.

La traduction orale de la réponse en langue étrangère est transmise dans l'aide auditive de l'utilisateur.³

Pour accéder à la fonction Traduire, allez dans :

Réglages > Traduire

- 1 Sélectionnez votre langue à gauche et la langue de votre interlocuteur à droite.
- 2 Appuyez sur le bouton du microphone . Il sera alors surligné en bleu.
- 3 Parlez dans le microphone de votre téléphone.
- 4 Une transcription de votre langue apparaît en haut de l'écran et celle de votre interlocuteur en bas.
- 5 La traduction orale des paroles de votre interlocuteur est transmise dans votre aide auditive connectée.





Transcrire


Sous-titrage codé en situation réelle

Avec la fonction Transcrire, les paroles détectées dans la langue sélectionnée sont affichées à l'écran sous forme de texte.

Pour accéder à la fonction Transcrire, allez dans :

Réglages > Transcrire

- 1 Choisissez la langue que vous souhaitez détecter en appuyant sur la barre bleue en haut de l'écran et en sélectionnant la langue.
- 2 Appuyez sur le bouton du microphone . Il sera alors surligné en bleu.
- 3 Les paroles sont détectées par le microphone du téléphone et retranscrites à l'écran.
- 4 Appuyez sur le bouton  pour enregistrer la transcription, la copier ou l'envoyer par message ou email.

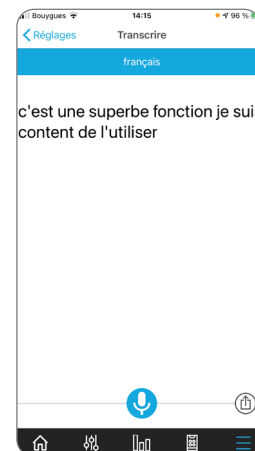

Self Check

Self Check fournit aux patients un moyen pratique et rapide d'analyser les performances de leurs aides auditives depuis l'application Thrive.


Pour accéder à la fonction Self Check, allez dans :

Réglages > Self Check

Sélectionnez **Lancer diagnostic** pour démarrer Self Check

Les résultats relatifs à chaque composant d'aide auditive s'affichent à l'écran. Appuyez sur chaque composant pour en savoir plus.

Pour en savoir plus, consulter le QuickTIP Self Check.

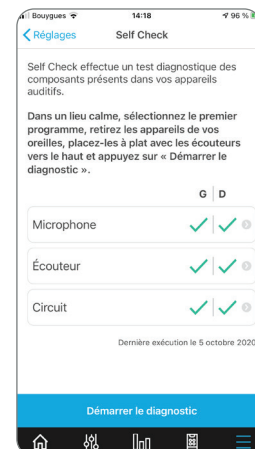


Hearing Care Anywhere

Se connecte à distance à un audioprothésiste pour ajuster la programmation des aides auditives.

Vous pouvez envoyer une demande de réglage à distance ou participer à une session live en utilisant le chat vidéo pour faire ajuster vos aides auditives en temps réel.

Pour en savoir plus, consulter le QuickTIP Hearing Care Anywhere.

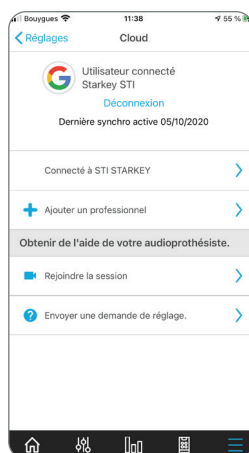

Pour accéder à la fonction Hearing Care Anywhere, allez dans :

Réglages > Hearing Care Anywhere

- Affiche l'état de connexion aux services Cloud et la date de dernière synchronisation. La connexion au Cloud est établie à l'ouverture de session, même si la programmation à distance est désactivée.
- Affiche un audioprothésiste connecté ou propose d'en ajouter un. Vous pouvez consulter les informations sur le centre des professionnels connectés en cliquant sur le nom du centre/de l'audioprothésiste.
- Sous "Obtenir l'aide de votre audioprothésiste", sélectionnez **Rejoindre une session live** ou **Envoyer une demande de réglage** pour commencer.

Rappels

Permet de définir des rappels pour des rendez-vous, la prise de médicaments, le renouvellement d'ordonnances ou d'autres tâches personnelles. Vous entendrez le rappel dans vos aides auditives et recevrez également une notification sur l'écran de votre smartphone.

Cette fonction est disponible à l'achat dans l'application pour les niveaux de technologie 1200 et 1000 AI en sélectionnant le menu Réglages Thrive > Abonnements > Rappels > S'abonner. L'utilisateur peut choisir de payer au mois ou à l'année.


Pour accéder aux Rappels, allez dans :

- **Réglages > Rappels**
- Appuyez sur **+** Nouveau rappel.
- Sélectionnez un nom de rappel dans la liste préremplie ou créez-en un.
- Sélectionnez vos préférences de rappel, comme la date et l'heure, la fréquence du rappel et un rappel sonore.




Tinnitus

Permet de régler le volume et la vitesse de modulation du stimulus Tinnitus dans les programmes qui ont été configurés pour pallier les acouphènes ou dans les programmes personnalisés basés sur ces programmes. L'écran Tinnitus sera visible dans l'application Thrive si l'audioprothésiste a activé le stimulus Tinnitus dans le programme actif.

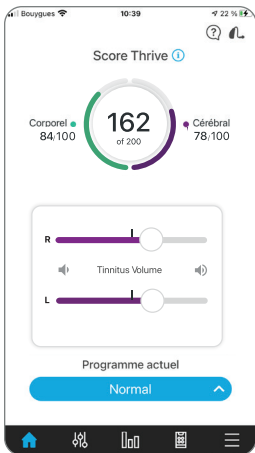

Réglage du volume du stimulus Tinnitus

Réglez le volume du stimulus Tinnitus individuellement ou faites glisser votre doigt dans la zone prévue à cet effet pour un réglage binaural. Appuyez deux fois pour rétablir le volume du stimulus par défaut.

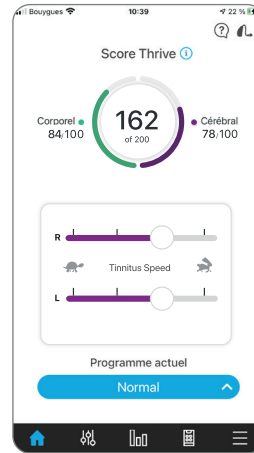


Réglage de la vitesse de Tinnitus

Faites glisser les cercles sur les curseurs pour régler la modulation, à gauche pour aucune modulation et à droite pour une modulation rapide.

Système CROS

Permet de régler la balance du son de l'émetteur par rapport au récepteur dans les programmes qui ont été configurés pour BiCROS ou dans les programmes personnalisés basés sur ces programmes. L'écran Balance sera visible dans l'application Thrive si l'audioprothésiste a activé BiCROS dans le programme actif.

- 1 Faites glisser l'icône en forme de cercle sur le curseur pour régler la balance du son de l'émetteur par rapport au récepteur.
- 2 Appuyez sur **Émetteur muet** pour activer le mode muet de l'émetteur.

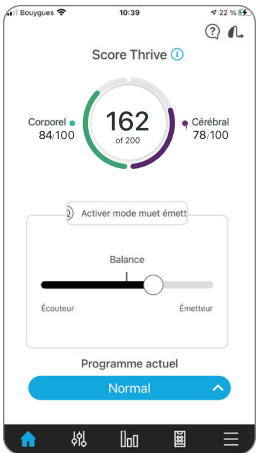

Autre

Réglages comprend également :

- Guide d'utilisation
- À propos de
- Réglages appareil
- Réglages appli
- Trouver mes aides auditives
- Mode démo

Le Mode Basique n'inclut pas :

- Score Thrive
- Transcrire
- Personnalisation de programme au-delà de l'égaliseur
- Écran Accessoires
- Traduire
- Self Check
- Rappels

Les fonctions peuvent varier d'un pays à l'autre.

¹Disponible avec les produits AI uniquement. ²Les accessoires sont uniquement jumelés aux aides auditives (pas à l'iPhone/l'application). ³Nécessite une connexion à Internet. Traduction disponible uniquement avec les produits AI. | L'application peut varier légèrement selon le modèle de votre téléphone et/ou de vos aides auditives. Le logo Starkey, Thrive, le logo Thrive, Inspire, IntelliVoice, SoundSpace et Hearing Care Anywhere sont des marques de Starkey Laboratories, Inc.